




**Siirrettävät suihku
WC-tuolit**

Raz-ART (Z333)

Käyttäjän ja jälleenmyyjän käsikirja

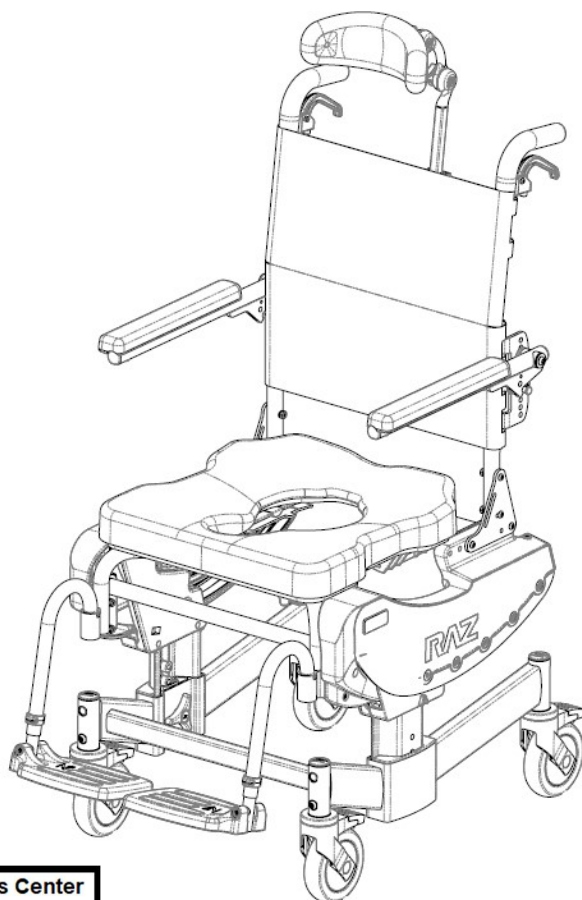

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZDESIGNINC2004V9

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että siirrettävä Raz-ART-suihku-alusastiatuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt suoritetaan huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti Raz-ART-tuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän käsikirjan osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan.

Raz-suihku- ja wc-tuolien sekä niiden lisävarusteiden luvaton muokkaaminen/muuttaminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset toimet mitätöivät välittömästi kaikki sovellettavat takuut ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja, laitteen toimintahäiriöitä tai säännösten noudattamatta jättämistä. Raz Design ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat luvattoman, muokatun tai muutetun laitteen käytöstä. Käyttäjä ottaa kaiken vastuun siitä, että laitetta käytetään tarkoitetulla sekä virallisessa dokumentaatioissa määritellyllä tavalla.

VALMISTAJA

Raz Design Inc.

135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7

877.720.5678 / +1.416.751.5678

info@razdesigninc.com



JALLEENMYYJAASI

Suomi

90240 Oulu, Finland

040 705 5886

info@rehaco.fi

TUOTE	KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINOKAPASITEETTI
Raz-ART	160 kg (352 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSET

TÄMÄ LAITE SOPII TYYPIN B: RAJOITETTUUN KÄYTTÖÖN (esim. KOTITALOUSKÄYTTÖÖN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkapoljin aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. **Parhaan etu-, taka- ja sivusuuntaisen vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkutuolin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.**

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan Raz-ART-tuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.



KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin Raz-ART-tuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – käytä tartuntapihtejä tai kurotustyövälineettä, tai pyydä apua.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin tai ylöspäin ilman hoitajaa, joka pystyy hallitsemaan Raz-ART-tuolia käyttäjän ollessa tuolissa laskeutumisen tai nousun aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja Raz-ART-tuolin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.

KÄYTTÄJÄ EI SAA sijoittaa Raz-ART-tuolia sivuttain kaltevasti, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit tai muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on testattava hoitajan kanssa sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydettyä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-ART-tuolia ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 suhde (5° kallistus).

ÄLÄ anna kenenkään muun kuin hoitajan liikuttaa (vetää tai työntää) käyttäjää Raz-ART-tuolissa.

Upottaminen

Raz-ART-tuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Siitä voi aiheutua vaurioita suihkutuolin osille.

Kloorille altistuminen

Sopii käytettäväksi märillä alueilla, mutta ei uima-altaissa ja vastaavasti syövyttävissä ympäristöissä.

ÄLÄ säilytä laitetta uima-altaiden lähellä, koska ilmassa oleva kloori aiheuttaa laitteen ruostumisen.




Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, ettei siirtymisiä voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja apuvälineet. Henkilöiden, jotka eivät tunne turvallisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisen aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.

Siirtyminen Raz-ART-suihkutuoliin

Lukitse **AINA** kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.


Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen pyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.

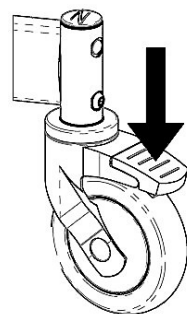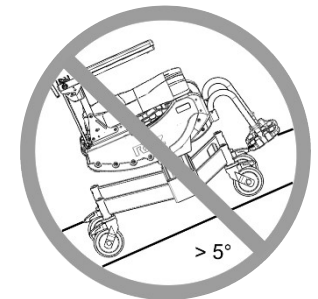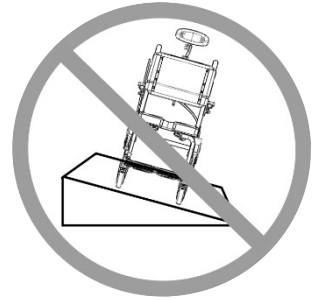

ÄLÄ seiso millään Raz-ART:n rungon osalla.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkatukia apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta Raz-ART-tuoliin on esteetön pääsy.

Raz-ART **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.

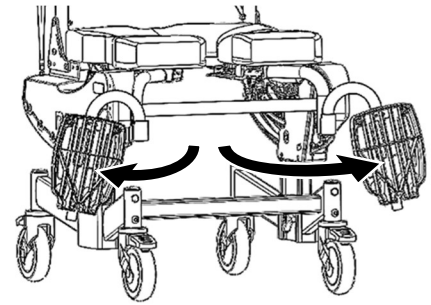

Kallistustoiminto

Tarkista **AINA** kallistustoiminto ja varmista, että molemmat kallistusmekanismien puolet ja vapautuskaapelirakenteet ovat täysin toimintakunnossa **ENNEN** kuin käyttäjä tulee tuoliin.

Lantiovyö voi toimia käyttäjän lisäturvatoimena. Raz-ART-tuoliin voidaan tilata lisävarusteena lantiotukihihna.

ÄLÄ yritä kallistaa tuolissa istujaa, jos hoitaja ei fyysisesti pysty suorittamaan kallistusta sujuvasti ja turvallisesti.

ÄLÄ KOSKAAN jätä käyttäjää Raz-ART-suihkutuoliin ilman valvontaa.

Raz-ART-suihkutuoli **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-ART-TUOLIIN ILMAN VALVONTAA.

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-ART-TUOLIA KÄYTTÄJÄN KERA TAI ILMAN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA.

KÄYTTÖTARKOITUSILMOITUS

YKSILÖLLISESTI KONFIGUROITAVA, LIIKKUVA JA KIINTEÄ WC-TUOLI KÄYTETTÄVÄKSI SUIHKUSSA JA WC:SSÄ.

TÄRKEÄÄ!

KONSULTOI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTA, JOS KÄYTTÄJÄNÄ KOKEET EPÄMUKAVUUTTA, LIIKKUVUUDEN MUUTOKSIA TAI VAIKEUKSIA LAITTEEN KÄYTÖSSÄ.

VAROITUS!

IHON PALOVAMMAVAARA

TUOTTEEN OSAT VOIVAT KUUMETA ALTISTUESSAAN ULKOISILLE LÄMMÖNLÄHTEILLE.

- **VARO KUUMENTUVIA PINTOJA KÄYTETTÄESSÄ SUIHKU-WC-TUOLIA SEN ALTISTUESSA KUUMALLE VEDELLE**
- **ÄLÄ ALTISTA TUOTETTA SUORALLE AURINGONVALOLLE ENNEN KÄYTTÖÄ**

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄ SIIRRETÄÄN TUOLIIN. ISTUIMEN TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ KOKONAAN ISTUIMEN TAKATUKIPUTKIEN ALLE. ISTUIMEN ETUKANNATTIMET ON LUKITTAVA TIUKASTI ISTUIMEN ETUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE. SEKÄ ISTUIMEN ETU- ETTÄ TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ PAIKALLEEN KIRISTÄMÄLLÄ ISTUIMEN ALLA SIJAITSEVAT 8 RUUVIA.

OHJEET ISTUIMEN ASIANMUKAISEEN IRROTTAMISEEN JA ASENNUKSEEN PUHDISTUSTA VARTEN ON ANNETTAVA KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI HOITAJILLE.



TÄRKEÄÄ!

RAZ-ART ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖÖN:

- SUIHKUSSA KÄYMISEN/KYLPEMISEN, WC:SSÄ KÄYMISEN JA MUIDEN HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN HOITON LIITTYVIEN TOIMINTOJEN APUVÄLINEENÄ;
- KÄYTTÄJÄN KEHON TUKEMISEEN ISTUVASSA TAI KALLISTETUSSA ASENNOSSA;
- HOITAJAN AVUSTAMANA TAI ILMAN;
- WC-KÄYNTIIN TAVALLISEN WC-ISTUIMEN YLÄPUOLELLA TAI ALUSASTIAISTUIMEN ALUSASTIAN KERA;
- AINOASTAAN SISÄKÄYTTÖÖN;
- SEKÄ TYYPIN A KORKEAN KÄYTTÖASTEEN (esim. LAITOKSESSA) YMPÄRISTÖISSÄ ETTÄ KOTIYMPÄRISTÖISSÄ

RAZ-ART EI SUORITA HOIDOLLISIA TAI DIAGNOSTISIA TOIMINTOJA, EIKÄ SE OLE TARKOITETTU MIHINKÄÄN HOIDOLLISIIN TAI DIAGNOSTISIIN TARKOITUKSIIN. KAIKKI RAZ-PERHEEN VALMISTAMAT TUOTTEET OVAT EI-STERIILEJÄ, UUELLEENKÄYTETTÄVIÄ, EI-INVASIIVISIA JA EI-IMPLANTOITAVIA.

RAZ-ART ON TARKOITETTU HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOILLA ON LIIKKUMISRAJOITTEITA, JOILLA VOI OLLA VAIKEUKSIA SEISOA TAI SÄILYTTÄÄ TASAPAINO SUORITTAESSAAN TOIMINTOJA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TYYPILLISILLÄ KÄYTTÄJILLÄ ON RAJALLINEN KESTÄVYYS JA ASENNONHALLINTA, JA HE SAATTAVAT TARVITA APUA HOITAJALTA TOIMINNOISSA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TUOTTEISSA, JOISSA ON KALLISTUSTOIMINTO, KALLISTUSTOIMINNON KÄYTTÖ SAATTAA OLLA VASTA-AIHEINEN, JOS KÄYTTÄJÄ ON HERKKÄ LEIKKAUSVOIMILLE ISTUINPINNOILLA AVATTAESSA ISTUIN TAAKSEPÄIN.


TUOTTEEN MERKINNÄT JA TAI SYMBOLIT

TUOTTEEN NIMIKKEET	RAZ-ART
VALMISTAJAN OSOITE	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
VALTUUTETUN EDUSTAJAN TIETOJA	EC REP UKRP CH REP
TUOTTEEN KUVAUS	SN ART-XXXXXX
UDI-DI	UDI 628758003335
LÄÄKINNÄLLINEN LAITE	MD
EUROOPPALAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS	CE
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ	
KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO	
LUE KÄYTTÖOPAS	

ISTUIMEN ETUKANNAKKEEN ASENNUS (JOS KÄYTÖSSÄ)



TORONTO, KANADA

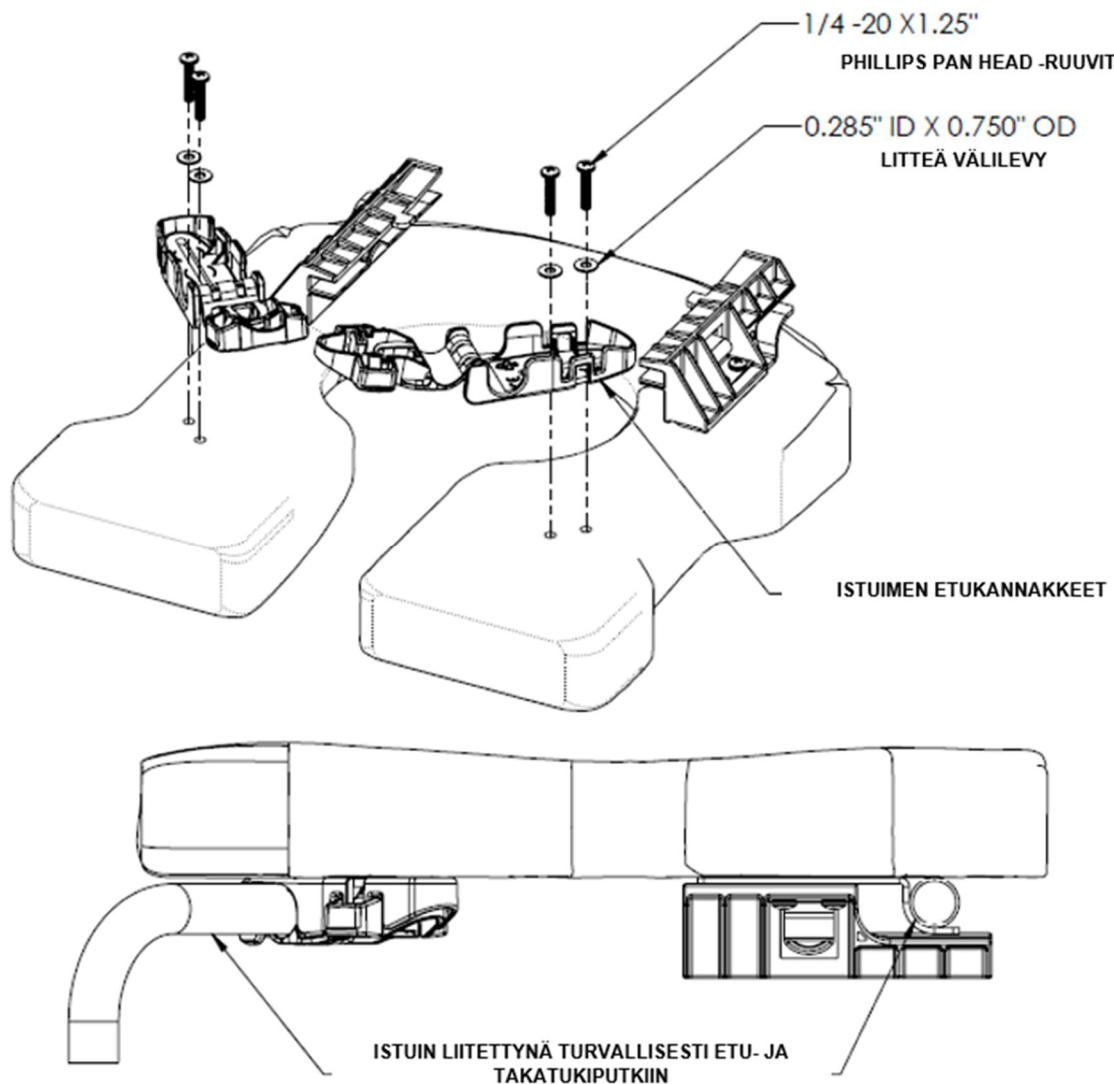

Katso yllä olevasta kuvasta asennusohjeet.

Huom.: Asenna Phillips Pan Head -ruuvit käsin. Sähkötyökalujen käyttö voi aiheuttaa kannakkeiden muodonmuutoksen.

Varmista asennuksen jälkeen, että kannakkeet on kunnolla kiinnitetty istuimeen. Avaa ja sulje kannakkeet tarkistaaksesi niiden toimivuuden.


Varmista aina, että istuin on oikein asennettu ja kiinnitetty. Takakoukkujen on oltava täysin kytkettyjä ja etukannattimien on oltava salvattuja ja lukittuja istuimen etutukiputkien ympärille.

KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0 YLEISIÄ TIETOJA.....	9
1.1 Raz-ART-yleiskatsaus	9
1.2 Raz-ART in tekniset tiedot.....	9
2.0 KOKOONPANO (VAIN JÄLLEENMYYJÄLLE/JAKELIJALLE)	10
2.1 Pohjarunko	10
2.1.1 Rungon kokoonpano	10
2.1.2 Istuimen korkeussäätö	10
2.2 Selkänojan.....	11
2.2.1 Selkänojan asennus.....	11
2.2.2 Selkänojan kulman säätö	11
2.2.3 Selkänojan säätö	11
2.2.4 Säädetävän selkäpehmusteen säätö	12
2.3 Kaapelin	12
2.3.1 Kaapelin asennus	12
2.3.2 Kaapelin säätö	12
2.4 Pyörien asennus.....	12
2.5 Raz-istuimen	13
2.5.1 Raz-istuimen asennus.....	13
2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen.....	13
2.6 Käsinojen säätö – Vain Adjusta-Back-vaihtoehto	13
2.6.1 Käsinojen korkeuden säätö	14
2.6.2 Käsinojen kulman säätö	14
2.7 Säädetävien jalkatukien.....	14
2.7.1 Säädetävien jalkatukien asennus	14
2.7.2 Jalkatuen säätö.....	14
2.8 Muotoillun pääntuen säätö	15
2.9 Kiinnitysten asennus.....	15
3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA	16
3.1 Kallistustoiminto	16
3.2 Käännettävä käsinoja	16
3.3 Säädetävä selkäpehmuste	16
3.4 Raz-istuimen	17
3.5 Säädetävät jalkatuet.....	17
3.6 Muotoiltu pääntuki	17
3.7 Pyörät.....	18
3.8 Alusastia.....	18
4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	19
4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen.....	19
4.1.1 Alusastia	19
4.1.2 Istuin	19
4.2 Puhdistus tarvittaessa	19
4.2.1 Runko, käsinojat, säädetävät jalkatuet ja muut osat.....	19
5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN.....	20
6.0 RAJOITETTU TAKUU.....	20
7.0 YHTEYSTIEDOT	21

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Raz-ART-yleiskatsaus

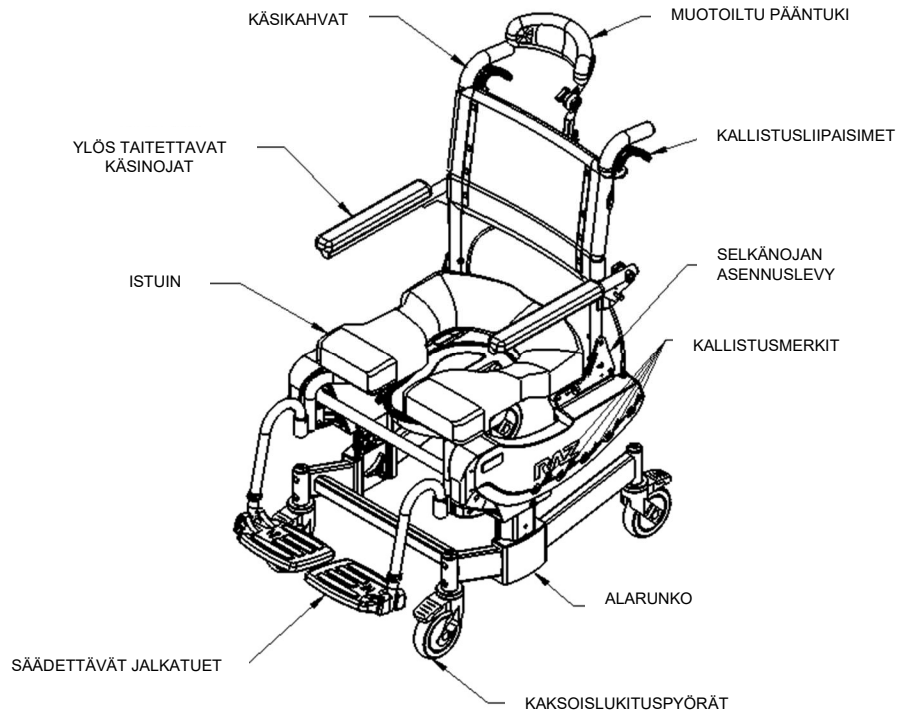

1.2 Raz-ART in tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-AT
PAINOKAPASITEETTI	160 kg (352 lbs)
RUNGON LEVEYS (istuimen runko)	46 cm (18")
OVERALL WIDTH	57 cm (22,5")
KOKONAISSLEVEYS	89 cm (35")
KOKONAISPITUUS (0° kallistuksessa, sis. jalkatuot)	128 cm (50,5")
KOKONAISPITUUS (40° kallistuksessa, sis. jalkatuot)	46 cm (18")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuim)	41-46 cm (16"-18"), 48-53 cm (19"-21")
VAPAA LEVEYS	40 cm (15,75")
VAPAA KORKEUS alusastiakannattimilla:	38-46 cm (15"-18"), 48-56 cm (19"-22")
VAPAA KORKEUS ilman alusastiakannattimia:	41-49 cm (15,5"-18,5"), 51-59 cm (19,5"-22,5")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	19-27 cm (7,5"-10,5") jossa 51 cm (20") Adjusta-Back 1,25 cm (1/2") välein
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	49,5-57 cm (19,5-22,5"), 59,5-67 cm (23,5-26,5") 2,5 cm (1") välein
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuot)	29 kg (64 lbs)
RUNKOMATERIAALI	Jauhemaalattu alumiini
PIENIN KÄÄNTÖYMPYRÄ	102 cm (40")

2.0 KOKOONPANO (VAIN JÄLLEENMYYJÄLLE/JAKELIJALLE)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos kierteet eivät ole voideltuja, voi tapahtua kiinnittimien kylmähitsausta.

- Levitä voiteluainetta (nestemäinen pesuaine, saippua, huulirasva, vaha jne.) kierteisiin ennen kiinnittimien kiristämistä sitovuuden vähentämiseksi.
- Älä ylikiristä kiinnittimiä.

TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.


2.1 Pohjarunko

2.1.1 Rungon kokoonpano

Pohjarunko voidaan koota kahdessa eri kokoonpanossa.

- Matalammassa kokoonpanossa korkeus lattiasta istuimeen on 49,5-57 cm (19,5-22,5").
- Korkeammassa kokoonpanossa korkeus lattiasta istuimeen on 59,5-67 cm (23,5-26,5").

Saavuttaaksesi korkeamman kokoonpanon irrota kaikki suojukset ja käännä runko ylösalaisin. Asenna suojukset takaisin alla kuvatun mukaisesti.

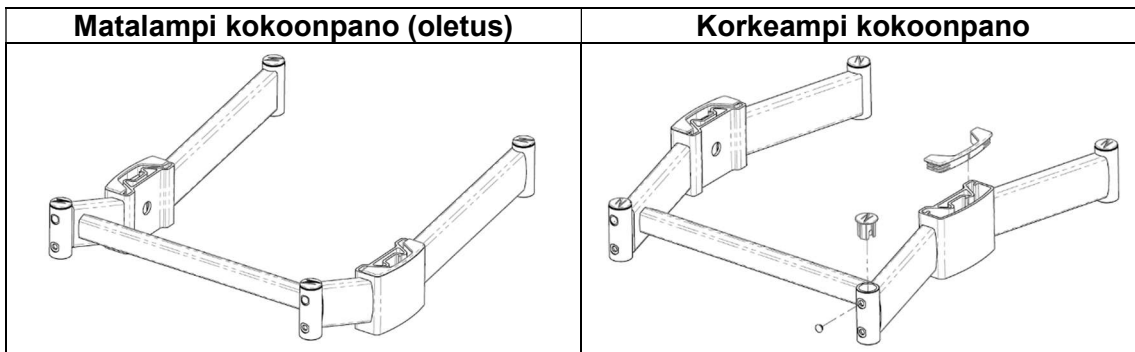

2.1.2 Istuimen korkeussäätö


Istuimen ja lattian välisen etäisyyden muuttamiseksi Raz-ART-mallissa istuimen runkoa nostetaan tai lasketaan perusrungon sisäpuolella sijaitsevilla säätönupilla.

1. Kallista tuoli eteenpäin varovasti pehmeälle ja puhtaalle alustalle (esim. matolle tai tasaiselle pakkauslaatikolle) alla olevan piirroksen mukaisesti.
2. Käännä vastapäivään löysätäksesi ja irrota molemmat korkeudensäätönupit ① käsin.
3. Säädä istuimen rungon korkeutta ylös tai alas tarpeen mukaan varmistaen, että reiät ovat samassa linjassa nupin vaihtamiseksi.

Huom.: Kukin reikä on sijoitettu 2,5 cm (1") välein

4. Aseta nuppi ① takaisin reikiin ja kiristä käntämällä myötäpäivään.
5. Varmista, että kaikki osat on asennettu tukevasti, ennen kuin nostat tuolin pystyasentoon.

Huom.: Istuimen ja lattian välistä korkeutta voidaan säätää edelleen muuttamalla alustan kokoonpanoa noudattamalla kohdassa 2.1.1 esitettyjä asennusvaiheita

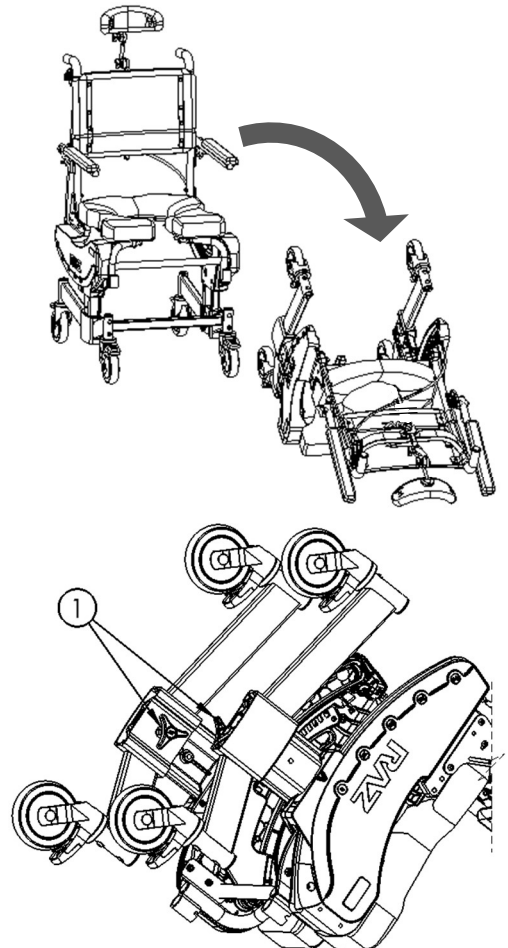


2.2 Selkänojan


2.2.1 Selkänojan asennus

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon.
VIHJE: # 2 Phillips-ruuvitaltta, jossa on 1/4" varsi, voidaan asettaa yhden levyn ja takatolppien läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.
2. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta nappikantaruuvi valitun selkänojan asennuslevyn reiän läpi, ja työnnä se varovasti runkoputkien läpi. Älä pakota ruuveja reikien läpi, koska se voi vahingoittaa kierteitä. Käytä kuusioavainta kiertääksesi ruuvia tarvittaessa.
3. Kiinnitä kaarevat aluslevyt ja lukkomutterit kuvan mukaisesti.
4. Toista vaiheet 3–5 toisella puolella.
5. Kiristä kaikki 4 asennusruuvia, kunnes koko aksiaalivälitys on poistettu, mutta älä kiristä liikaa.

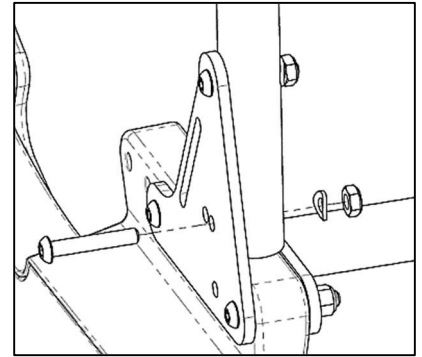


TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

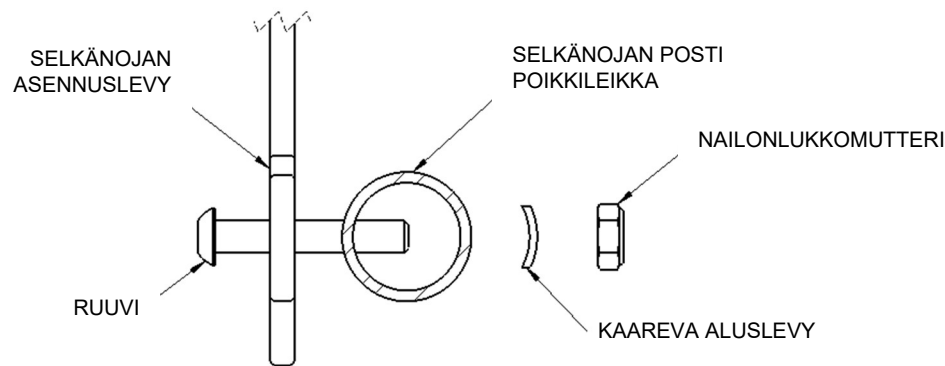

2.2.2 Selkänojan kulman säätö

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Löysää yläruuvit ja lukkomutterit, jotka kiinnittävät takakiinnityslevyn rungon pystysuoriin takaputkiin.
2. Irrota alaruuvi molemmilta puolilta.
3. Kierrä selkänoja toiseen selkänojan asennuslevyn kahdesta asennosta. *Huom.: Valitse etummainen reikä 97° selkänojakulmalle ja takimmainen reikä 90° kulmalle.*
4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn reikien läpi, ja työnnä ne varovasti runkoputkien läpi. Älä pakota ruuvia reikien läpi. Käytä kuusioavainta kiertääksesi ruuvia tarvittaessa.
5. Aseta kaarevat aluslevyt ja lukkomutterit ruuvien päihin.
6. Kiristä kaikki neljä ruuvia ja lukkomutteria, mutta älä kiristä liikaa.

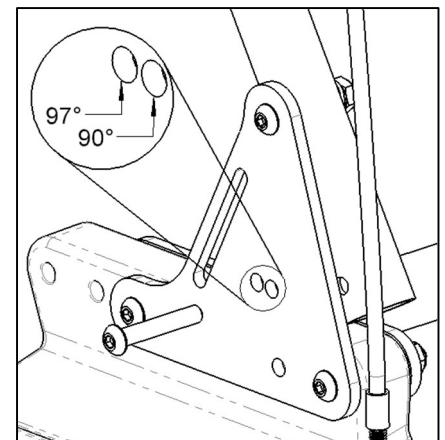


2.2.3 Selkänojan säätö

Selkänojassa on noin 2,5 cm (1") etu/takasuuntainen säätövara


Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Irrota kaikki ruuvit ja lukkomutterit selkänojan kiinnityslevystä ja irrota selkänoja.
2. Irrota kaikki ruuvit ja lukkomutterit selkänojan kiinnityslevystä.
3. Siirrä selkänojan asennuslevy haluttuun asentoon ja asenna osat uudelleen.
4. Asenna selkänoja takaisin päinvastaisessa järjestyksessä kuin vaiheen 1 irrotusprosessissa.

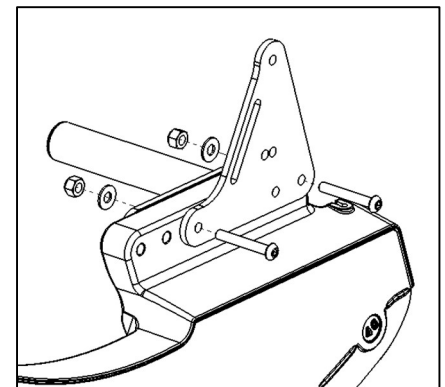

2.2.4 Säädetävän selkäpehmusteen säätö

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

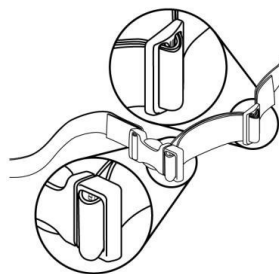


2.3 Kaapelin

2.3.1 Kaapelin asennus

1. Purista kallistusliipaisinta, kunnes se nojaa kahvaa vasten.
2. Aseta kaapelin pää liipaisukahvan reiän läpi.


VIHJE: Jos kaapelissa ei ole tarpeeksi väljyyttä, tarkista, että kaapelivaippa on työnnetty kokonaan kaapelin alaosaan sijaitsevaan kierrekaapeliliittimeen.

3. Vapauta liipaisinkahva ja vedä kaapelivaippaa alaspäin paljastaaksesi kaapelijohdon.
4. Pujota kaapelijohto kotelon halkion läpi.
5. Työnnä vaipan kärki liipaisinkotelon alaosaan ja vapauta.
6. Toista vaiheet 1–5 toiselle puolelle.

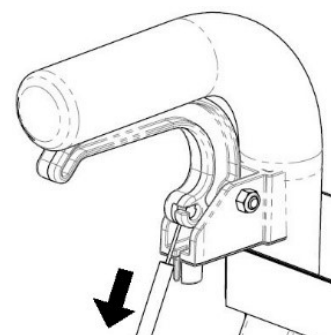

2.3.2 Kaapelin säätö


Ennen tuolin käyttöä on tärkeää tarkistaa, että jokainen kaapeli on asianmukaisesti säädetty ja että kallistuksenlukitusjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti. Kallista tuolia noin 20°, purista samalla lukitusmekanismia hallitsevaa kallistusliipaisinta tuolin toisella puolella ja yritä muuttaa tuolin kallistuskulmaa molempiin suuntiin. Jos kallistuskulmaa voidaan muuttaa, kun yhtä liipaisinta puristetaan, kallistuslukitusta hallitsevaa toisen puolen kaapelia on säädetävä. Tee se löysäämällä lukkomutteria ja kiertämällä kierrekaapeliliitintä 1-3 kokonaista kierrosta myötäpäivään. Testaa uudelleen (sääda uudelleen kaapeliliitintä tarvittaessa) ja kiristä lukkomutteria sivupaneelia vasten, jos tuoli ei liiku testin aikana. Toista testi toiselle kallistusliipaisimelle ja sääda tarvittaessa. Jos kallistuslukitusvipu napsahtaa lukituslevyn lovia vasten, kun tuolia kallistetaan ja molempia kallistusliipaisimia puristetaan, toista tai molempia kaapeleita on säädetävä. Löysää lukkomutteria sillä puolella, jolta ääni kuuluu ja kierrä kaapeliliitintä 1-3 kokonaista kierrosta vastapäivään. Kallista tuolia ja kuuntele kuuluuko napsahtavaa ääntä. Kiristä kaapeliliittimen lukkomutteri, jos ääni on lakannut kuulumasta.

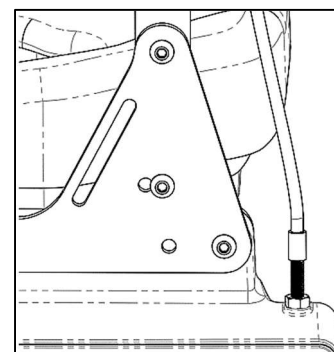

2.4 Pyörien asennus

Tarvittavat työkalut: 5mm kuusioavain


1. Asenna pyörän varsi pohjarungon pyöräkoteloon.
 2. Kohdista pyörävarren kierrereikä reikään, joka on pyöräkotelossa.
 3. Aseta M8-nappikantaruuvi pyöräkoteloon.
- HUOM.:** Varmista, että jokaisella ruuvilla on rengaslukite tai keskivahvaa kierrelukitusnestettä kierteissä ennen niiden käyttöä.
4. Kierrä M8-ruuvi pyöräkotelon läpi ja pyörän varteeseen.
 5. Varmista, että ruuvi on kiristetty ja pyörä on tiukasti paikallaan.
 6. Toista vaiheet 1–5 kolmelle muulle pyörälle.

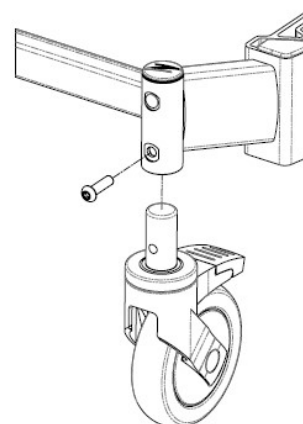

2.5 Raz-istuimen

2.5.1 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa.
2. Liu'uta istuimen takaosa takaosan tukiputkien yli samalla kun istuimen etuosa lasketaan runkoon. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat istuimen tukiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

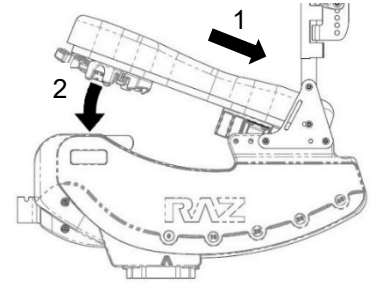


2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu-/takasuuntainen säätövara, joka mahdollistaa istuimen aukon optimaalisen sijoittamisen käyttäjän istuinluiden ympärille.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta


1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
2. Nosta istuimen etuosaa, vedä ylöspäin ja sitten eteenpäin irrottaaksesi istuimen tuolista.
3. Löysää (mutta älä irrota) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen. Huom.: Istuimen takakannattimet on esitetty alla ilman alusastian kannattimia selkeyden vuoksi.
4. Aseta istuin takaisin paikoilleen runkoon ja sulje istuimen etukannattimet etutukiputkien ympärille.
5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
6. Tarkista, että istuimen takakannattimet ovat tiukasti sijoitettu takatukiputkea vasten.
7. Kiristä kaikki kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimeen estääksesi istuimen liikkumisen. Huom.: Varmista, että istuimen etu- ja takakannattimet on tiukasti lukittu istuimen etu- ja takatukiputkien ympärille ennen käyttäjän siirtymistä tuoliin.

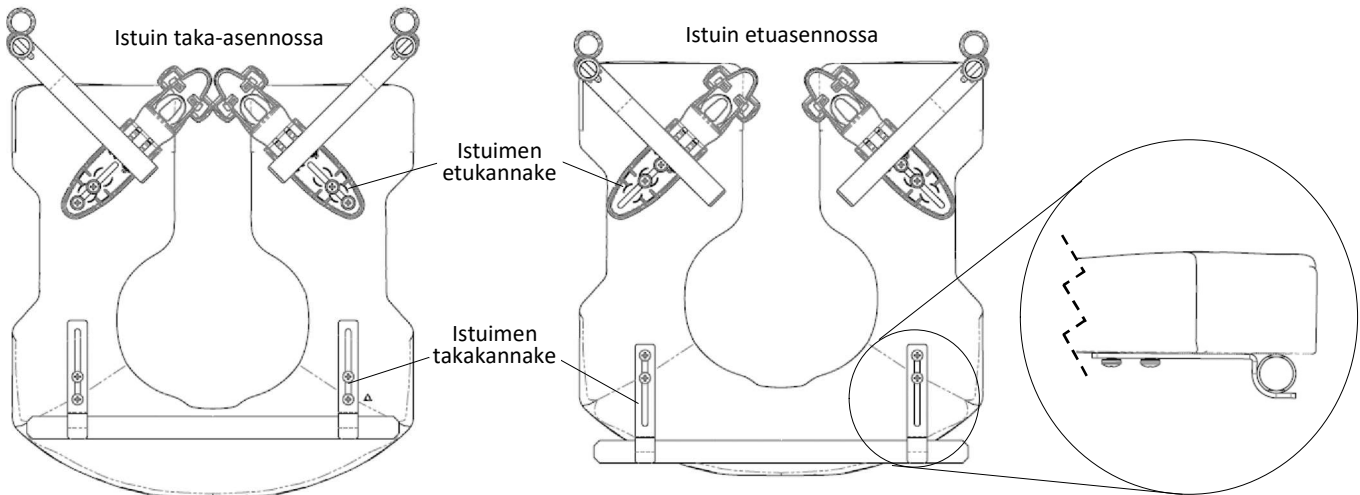

2.6 Käsinojen säätö – Vain Adjusta-Back-vaihtoehto

Tarvittavat työkalut vaihtelevat laitteiston mukaan, varmista, että oikeat työkalut on valittu turvallista asennusta varten. Kehys, jossa on tunnistereikä, on metrinen.


- Keisarillinen-laitteistolle: 7/32" kuusioavain, 9/16" kiintoavain;
- Metrinen-laitteistolle: 5 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

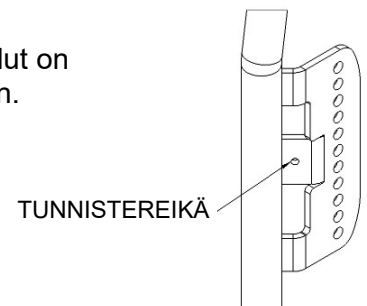

2.6.1 Käsinojan korkeuden säätö

Käsinojat ovat säädettävissä 7,5cm (3") alueella ½" välein **vain** Adjusta-Back-vaihtoehdossa.


1. Löysää ja irrota alempi lukkomutteri.
2. Löysää ja irrota ylempi lukkomutteri.
3. Pitäen käsinoja ja käsinojen kääntölevyrakennetta yhdessä, siirrä yksikköä ylöspäin tai alaspäin käsinojan tukikiinnityksessä riippuen käyttäjän tarpeista.
4. Aseta yläruuvien lukkomutteri paikoilleen.
5. Aseta alaruuvien lukkomutteri paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit ja lukkomutterit ylhäältä ja alhaalta.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle käsinojalle.

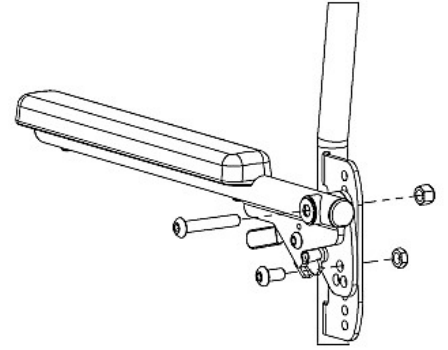

2.6.2 Käsinojan kulman säätö

Käsinojen kulmaa voidaan säätää 5° ylöspäin tai 5° alaspäin, jos selkänojan kulmaa säädetään 90° tehdasasetuksesta.


1. Löysää ja poista ruuvit, välilevyt ja lukkomutterit käsinojan kääntölevyn alaosasta.
2. Pitäen yläruuvia paikoillaan, kierrä käsinojarakennetta kunnes haluttu asento savutetaan, kohdistuen yksi kolmesta (kolmion muotoon järjestetystä) käsivarren taittolevyn reiästä kohdistettuna käsinojan tukikiinnityksen reikiin.
3. Aseta ruuvi haluttuun käsinojan taittolevyn kohtaan, ja kiinnitä lukkomutteri.
4. Kiristä ruuvi ja lukkomutteri.
5. Toista vaiheet 1–4 toiselle käsinojalle.

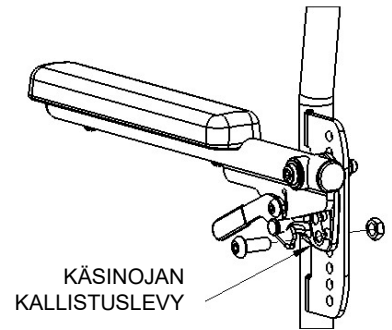

2.7 Säädettävien jalkatukien


2.7.1 Säädettävien jalkatukien asennus

1. Poista jalkatuet tarvikelaitokosta.
2. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
Jos ripustusputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

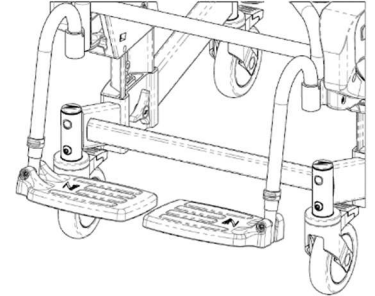

2.7.2 Jalkatuen säätö

1. Irrota muovinen napsautusnasta jalkatuen ripustusputkesta.
2. Säädä jalkatuen jatkoputki pystysuoraan saavuttaaksesi halutun asennon.
3. Aseta napsautusnasta takaisin jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle puolelle.


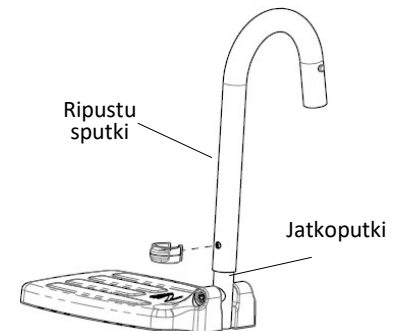


2.8 Muotoillun pääntuen säätö

Kaikkiin Raz-ART-suihkutuoleihin kuuluu muotoiltu pääntuki. Muotoiltu pääntuki on muotoiltu suojaamaan päätä mukavasti ja se on helppo puhdistaa. Muotoiltua pääntukea voidaan säätää portaattomasti eteen- ja taaksepäin 125mm (5") alueella, ja pystysuunnassa 140mm (5½") alueella.


Tarvittava työkalu: 4mm kuusioavain

1. Löysää muotoillun pääntuen kolmiokantanupit ja säädä kulma ja korkeus käyttäjän mieltymysten mukaan. Kiristä kolmiokantanupit täysin kiinni, jotta muotoillun niskatuen kulma ja korkeus saadaan kiinnitettyä.
2. Muuttaaksesi pääntuen tyynyn kulmaa, löysää (älä irrota) muotoillun pääntuen takana olevat kolme ruuvia. Kierrä pääntukea pääntuen kiinnitystangon ympäri käyttäjälle sopivaksi, ja kiristä ruuvit kiinnittääksesi sen.
3. Varmista, että kaikki nupit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.

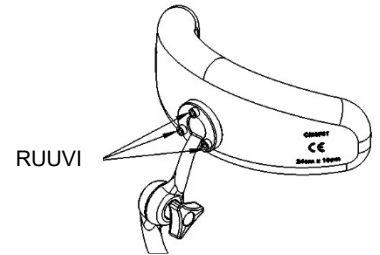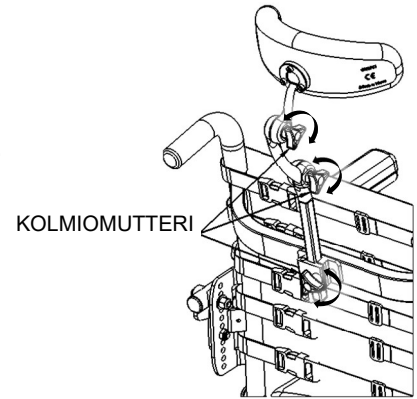

2.9 Kiinnitysten asennus

Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti käsin eikä sähkötyökalujen avulla. Sähkötyökalujen nopeus ja vääntömomentti voivat saada kiinnikkeet tarttumaan kiinni ja kylmähitsautumaan paikalleen pysyvästi. On myös suositeltavaa lisätä nestesaippuaa (astianpesu-/käsisaippuaa) ruuvien kierteisiin kiinnikkeiden kiinni tarttumisen estämiseksi. Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, on ehkä vaihdettava uudelleenkäytön sijaan. Tarkista lukkomutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen. Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus. Jos sitä ei ole, vaihda lukkomutteri uuteen. Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

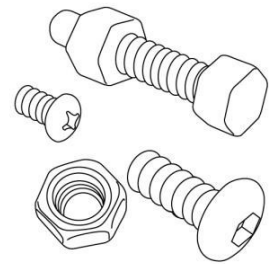


3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

3.1 Kallistustoiminto

Raz-AT kallistuu enintään 40° ollakseen mukavampi ja vähentääkseen käyttäjän istumapainetta. Kallistaakseen tuolia, hoitajan on puristettava molempia kallistusliipaisimia ja siirrettävä tuoli haluttuun kulmaan. Lukitaksesi tuolin paikalleen, vapauta vain liipaisimet, niin kallistusmekanismi lukittuu.

Huom.: Jos sinulla on vaikeuksia vapauttaa kallistuslukitusmekanismi puristamalla liipaisimia, keinuta selkänojaa varovasti edestakaisin vapauttaaksesi mekanismin.

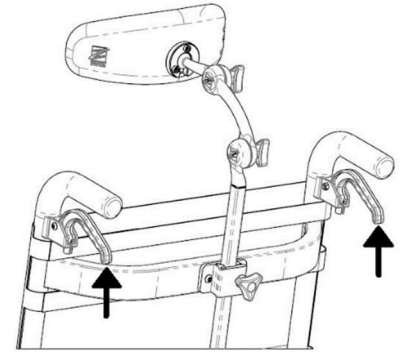


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ YRITÄ KALLISTAA TUOLISSA ISTUJAA, JOS HOITAJA EI FYYSISESTI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN KALLISTUSMEKANISMIA SUJUVASTI JA TURVALLISESTI KÄYTTÄJÄN OLLESSA TUOLISSA. KAIKKIEN HOITAJIEN ON TUNNETTAVA OIKEAT KALLISTUSTEKNIIKAT ENNEN KUIN HE AUTTAVAT KÄYTTÄJÄÄ SUIHKUALUSASTIAN KANSSA. LAINTIOVYÖTÄ SUOSITELLAAN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE LISÄTURVATOIMENA.

3.2 Käännettävä käsinoja

Käsinojat voivat kääntyä ylös siirron helpottamiseksi ja lukittua automaattisesti (jos valinnainen lukko on mukana), kun ne käännetään alas.

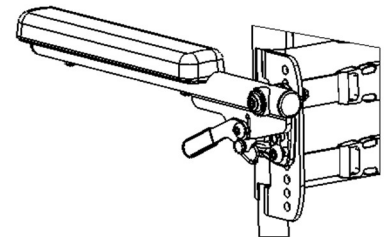


3.3 Säädetty selkäpehmuste

Adjusta-Back-selkätuissa on säädettävä selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Selkäpehmuste on irrotettava konepesua varten, ja se on saatavana 15" (4 hihnaa), 17" (5 hihnaa), 20" (6 hihnaa) ja 24" (7 hihnaa) pituisina tuolille valitun selkänojan pituuden mukaisesti.


Asentaaksesi säädettävän selkäpehmusteen 17" korkeaan Adjusta-Back-tukeen:

1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistaen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ylin hihna (1) on poikkituen yläpuolella.
3. Toinen (2) ja kolmas (3) hihna on sijoitettu ristitankojen ja selkänojan kiinnityslevyjen väliin. 15" korkeassa selkätuessa on vain yksi hihna tässä kohdassa.
4. Neljäs (4) ja viides (5) hihna asetetaan käsinojen asennuslevyjen aukkojen läpi.
5. 20" (51cm) Pitkässä selkätuessa on kuudes hihna, joka sijaitsee käsitukien asennuslevyjen alapuolella.
6. Säädä kaikki hihnat käyttäjän tarpeen mukaisesti.

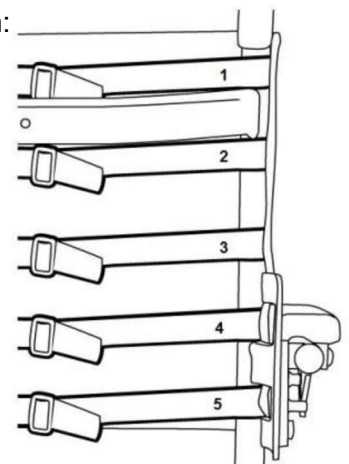

HUOM.: 24" (61cm) Adjusta-Back -tuessa kaksi ylintä hihnaa on oltava selkätuen poikkituen yläpuolella. Muut viisi hihnaa ovat samalla korkeudella kuin 20" (51cm) Adjusta-Back-tuessa.

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

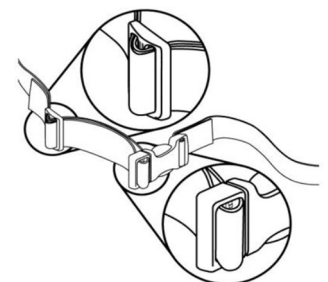


Säädettävän selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

3.4 Raz-istuimen

Asentaaksesi Raz-istuimen:

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa.
2. Liu'uta istuimen takaosa takaosan tukiputkien yli samalla kun istuimen etuosa lasketaan runkoon. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat istuimen tukiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

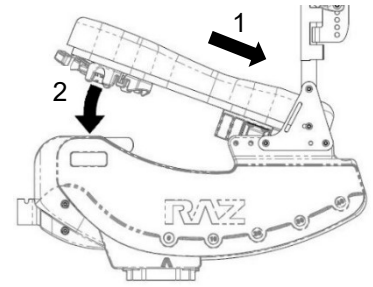

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYyjÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

3.5 Säädetävät jalkatuet

Säädetävät jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa Raz-suihkutuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taittaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. Säädetäviä jalkatukia voidaan laajentaa pitempijalkaisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5cm (2") pitemmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin Raz-suihkutuoleihin.

Asettaaksesi säädetävät jalkatuet:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen


Säätääksesi säädetävien jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

Kiertääksesi säädetäviä jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisäänpäin.

Poistaaksesi säädetävät jalkatuet nosta jalkatuet pois rungon vastaholkeista.

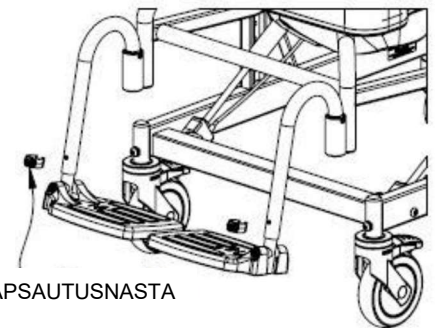


NAPSAUTUSNASTA

3.6 Muotoiltu päántuki

Kaikkiin Raz-ART-suihkutuoleihin kuuluu muotoiltu päántuki. Muotoiltu päántuki on muotoiltu suojaamaan päätä mukavasti ja se on helppo puhdistaa. Muotoiltua päántukea voidaan säätää portaattomasti eteen- ja taaksepäin 125mm (5") alueella, ja pystysuunnassa 140mm (5½") alueella.

Säätääksesi muotoiltua päántukea:


1. Löysää muotoillun päántuen kolmiokantanupit
2. Säädä kulma ja korkeus käyttäjän mieltymysten mukaan.
3. Kiristä kolmiomutteri kiinnittääksesi sen.
4. Varmista, että kaikki nupit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.

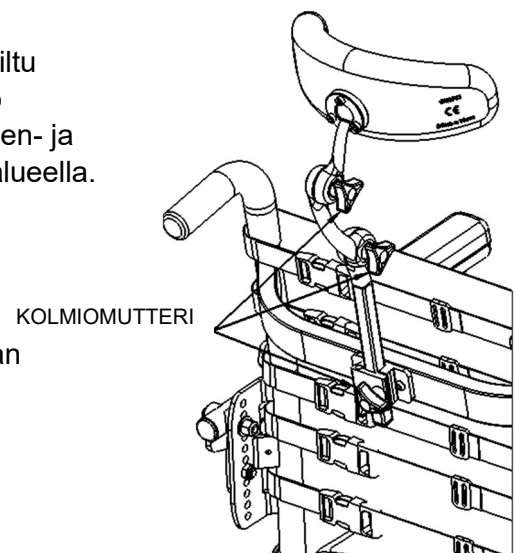

KOLMIOMUTTERI

3.7 Pyörät


Jokainen pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kiinnittääksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon poljinta, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla vivun koholla olevaa päätä, kunnes se vapautuu.

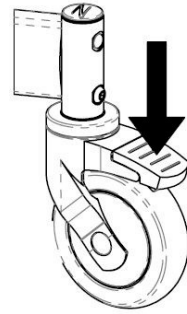

3.8 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin.

Huom.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.

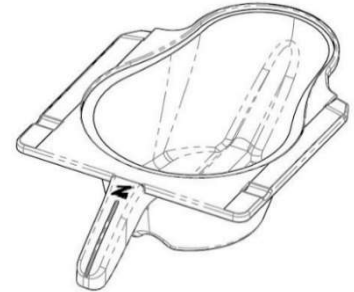

TÄRKEÄÄ!

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON OTETTAVA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN RAZ-JÄLLEENMYYJÄÄN KAIKKIEN KIINNITYSTEN, PYÖRIEN JA PYÖRÄLUKKOJEN, LAITTEISTON JA KAIKKIEN MUIDEN LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMISTA VARTEN.

4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

4.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiainepuhdistusliuoksen.

4.1.2 Istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä. **ÄLÄ UPOTA** istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.
3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympäröykseen pääsee käsiksi paremmin.

4.2 Puhdistus tarvittaessa

4.2.1 Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat

Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden säännöllistä tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toiminnassa havaitaan mahdollisia ongelmia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko suihkutuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

ÄLÄ käytä klooria sisältäviä tuotteita millekään Raz-osille.

Raz-ART-tuoli on säilytettävä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Vältä altistumista kloorille (esim. altaissa ja allastiloissa), koska se heikentää ja värjää tuolin rakenteita ajan mittaan.

4.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Pinnan desinfiointi	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.)

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAUSJAUHEITA TAI HANKAUSTYÖNYJÄ Raz-ART-TUOLILLE.

ÄLÄ UPOTA Raz-ART-TUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINEMÄÄRÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEEN OHJEISIIN JA RYHTYMATÄT TARVITTAVIIN VAROTOIMIIN LIITTYEN IHMISTEN ALTISTUMISELLE KEMIKAALEILLE.

ÄLÄ KÄYTÄ KLOORIA SISÄLTÄVIÄ TUOTTEITA Raz-ART-TUOLILLE.

5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN

TÄRKEÄÄ!

Jos tähän laitteeseen liittyen tapahtuu vakava tapahtuma, joka on johtanut tai voi johtaa kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai vakavaan terveydentilan heikkenemiseen, siitä on ilmoitettava viipymättä:

- valmistajalle (yhteystiedot on annettu tässä käyttöohjeessa) ja
- käyttäjän tai potilaan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle.

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-ART-tuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan alueellisia ja kansallisia lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design Inc. takaa kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla Raz-ART-tuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Raz-ART-tuolisi. Jos et saanut tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisia:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä Raz-ART-tuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Näihin sisältyvät rajoittumatta valtuuttamattomien osien tai lisälaitteiden käyttö, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdystä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittua takuuta sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoa pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan Raz-ART-tuoliin.

Raz Design Inc. runko- ja rakennemateriaalit ovat ruostumatonta terästä ja alumiinia, joille annamme elinikäisen ruostumatomuustakuun. Huomaa, että tämä elinikäinen takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-

jälleenmyyjältä. Asianmukaisten puhdistusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa rungon ruostumista ja mitätöidä tämän takuun. Lisäksi kaikki ruostumista koskevat vaatimukset katselmoidaan ja niihin voi liittyä pyyntö palauttaa tuote tarkempaan tutkimukseen ennen kuin vaihtotuotteen tilaus voidaan käsitellä.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että Raz-ART kootaan oikein, ja että kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



JALLEENMYYJAASI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO TARKEMPIA TIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA OIKEAAN HÄVITTÄMISMENETTELYYN LIITTYEN.

ON TÄRKEÄÄ TARKISTAA TUOLI ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. KAIKKI OSAT, SISÄLTÄEN SELKÄNOJAN, KÄSINOJAT, ISTUIMEN, POHJARUNGON JA PYÖRÄT, ON KIINNITETTÄVÄ PAIKOILLEEN. OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI/JAKELIJAASI JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN Raz-ART-TUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTAU TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEeseen JÄLLEENMYYJÄÄN/JAKELIJAAN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTTÖÄ. ÄLÄ KÄYTÄ TUOLIA ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI TAI JAKELIJASI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTIOSOITE: info@razdesigninc.com
PUHELIN: 877.720.5678 (Pohjois-Amerikka)
+1.416.751.5678 (Muu maailma)