





Kylpy- / suihku- / WC-
tuoli

Raze

Z444

Käyttäjän ja jälleenmyyjän käsikirja

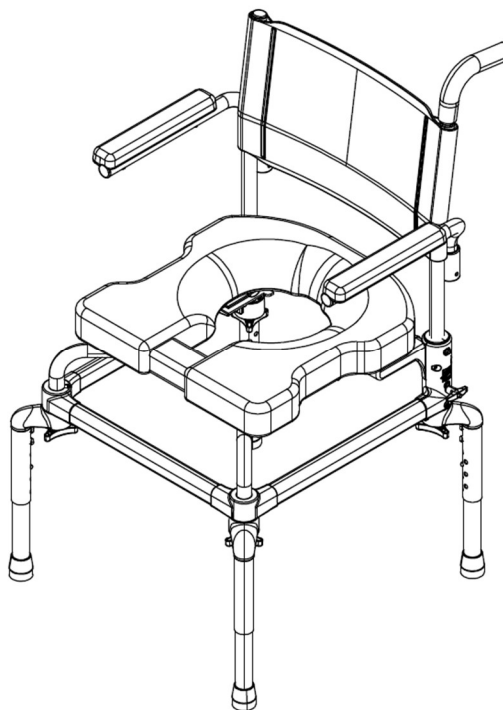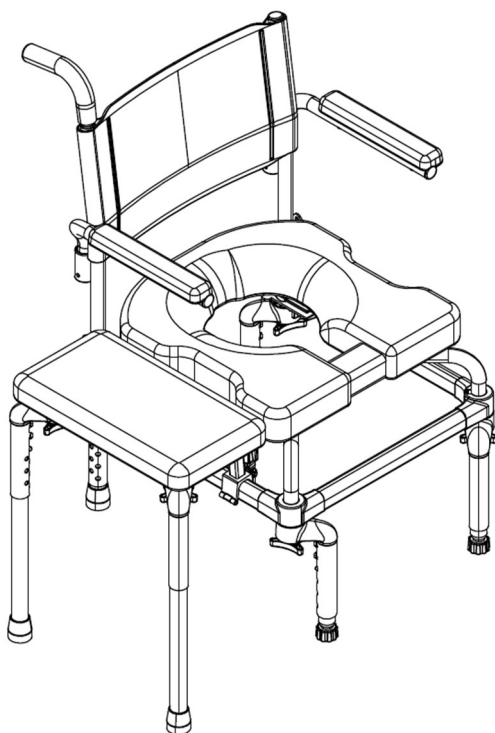

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZEDESIGNINC2004V9

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että Raze kootaan oikein, ja että kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti Razen turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.

Raz-suihku- ja wc-tuolien sekä niiden lisävarusteiden luvaton muokkaaminen/muuttaminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset toimet mitätöivät välittömästi kaikki sovellettavat takuut ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja, laitteen toimintahäiriöitä tai säännösten noudattamatta jättämistä. Raz Design ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat luvattoman, muokatun tai muutetun laitteen käytöstä. Käyttäjä ottaa kaiken vastuun siitä, että laitetta käytetään tarkoitetulla sekä virallisessa dokumentaatioissa määritellyllä tavalla.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.

135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7

877.720.5678 / +1.416.751.5678

info@razdesigninc.com



JALLEENMYYJAASI

Suomi

90240 Oulu, Finland

040 705 5886

info@rehaco.fi

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN

Raze

160 kg (352 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI JÄLLEENMYYNITARKOITUKSESSA


TÄMÄ LAITE SOPII TYYPIN A: KOVAAN KÄYTTÖÖN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN.

Vakaus

Razen jalat ovat säädettävissä useille korkeuksille. Jousipainikkeen on lukituttava kokonaan säätöreikiin, jotta jalat lukittuvat paikoilleen.

Varmista, että Raze on vaakasuorassa. Siirtopintaa käytettäessä se on lukittava tukevasti tuoliin salpojen avulla. **Varmista, että siirtopinta on vaakasuorassa.**

Jalat kääntyvät, joten Razen jalanjälkeä voi säätää niin wc:n yläpuolella kuin ammeessakin käytettäväksi. **Jalkojen TÄYTYY olla sijoitettu suurimmalle sallitulle alalle optimaalisen eteen-, taaksepäin ja sivuttaisvakauden saavuttamiseksi.** Katso kuvista jalkojen asennot maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.

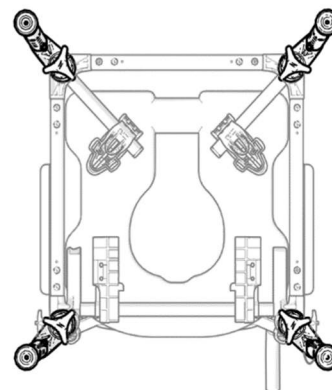

JALKOJEN ASENNOT
ESITETTYNÄ OPTIMAALLISESSA
VAKAUDESSA

Vakaussivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin Raze-tuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – on käytettävä tartuntapihtejä tai pyydettyä apua muilta.

KÄYTTÄJÄ EI SAA sijoittaa Raze-tuolia sivuttain kaltevasti ilman vakaustestä, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Vakaus eteenpäin

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan Raze-tuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA istua Raze-tuolin etureunalla, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.


Vakaus taaksepäin

KÄYTTÄJÄ EI SAA ripustaa raskaita esineitä työntökahvaan siirtyessään Raze-tuoliin, sillä se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen taaksepäin.


Käyttö kylpyammeen kanssa

KÄYTTÄJÄN TÄYTY kiinnittää siirtopinta käyttäessään tuolia kylpyammeessa.

Kylpyammeiden pohjat ovat aina viistossa viemäriä kohti. Razen kierteitetty kumipäät on säädettävä, jotta istuin on vaakasuorassa ammeessa.

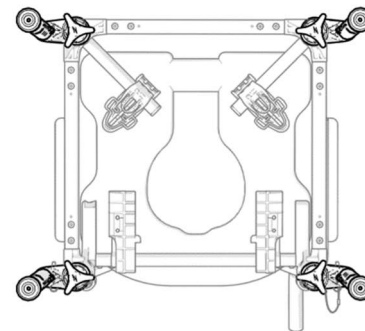

JALKOJEN ASENNOT
ESITETTYNÄ MAKSIMAALISESSA

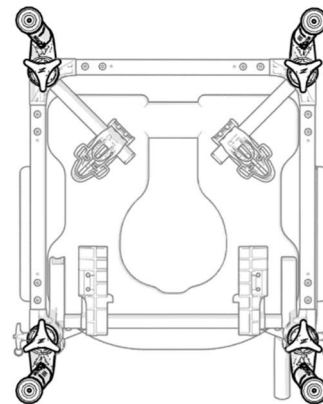

JALKOJEN ASENNOT
ESITETTYNÄ MAKSIMAALISESSA
ETEE-/TAAKSESUUNTAISESSA
VAKAUDESSA

TÄRKEÄÄ!

RAZEN VAKAUTEEN VAIKUTTAVAT KORKEUS LATTIASTA ISTUIMEEN, JALKOJEN SIJAINTI, KÄYTTÄJÄN FYSIKAALISET JA KLIINISET OMINAISUUDET SEKÄ SELKÄNOJAN JA SIIRTOALUSTAN ASENNUS. VAKAUSTESTI ON SUORITETTAVA SELLAISEN HOITAJAN LÄSNÄOLLESSA, JOKA VOI ESTÄÄ TUOLIN KAATUMISEN TAI LIIKKUMISEN.

Kloorille altistuminen

Sopii käytettäväksi märillä alueilla, mutta ei uima-altaissa ja vastaavasti syövyttävissä ympäristöissä.

ÄLÄ säilytä laitetta uima-altaiden läheisyydessä, koska ilmassa oleva kloori voi aiheuttaa ruostumista joihinkin tuolin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin.

Siirtymiset

Siirtyminen on vaarallisin osa mitä tahansa wc- tai kylpytuolia käytettäessä. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan siirtomenettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät tunne turvallisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisien aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Valinnaisten jalkatukien jalkalevyt on käännettävä ylös tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta Raze-tuoliin on esteetön pääsy.


ÄLÄ seiso jalkalevyjen päällä.

Siirtyminen Razeen

Aseta **AINA** tuolin jalat mahdollisimman tukevasti. Katso kuvat kohdassa **Vakaus**. Jos siirtoalusta on asennettu, varmista, että pinnan jalat on säädetty oikealle korkeudelle siten, että kaikki jalat ulottuvat lattiaan ja sekä istuin että siirtoalusta ovat vaakasuorassa. Jos selkänoja on asennettu, käsinojat voidaan kääntää sivuun tai irrottaa sivuttaissiirtoja varten. Kun käsinojia käytetään siirtymisen apuna, niiden on oltava kokonaan kiinni tukiosissa tahattoman pyörimisen estämiseksi. Tämä voi aiheuttaa käyttäjille tasapainon menetyksen ja vakavia vammoja.

Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Lattian liukkaita voi aiheuttaa pöly, vesi, saippua tai mikä tahansa aine, joka estää etu- tai takapyöriä tarttumasta laittaan turvallisesti. Huomaa, että suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.

ÄLÄ seiso millään Raze-rungon osalla.

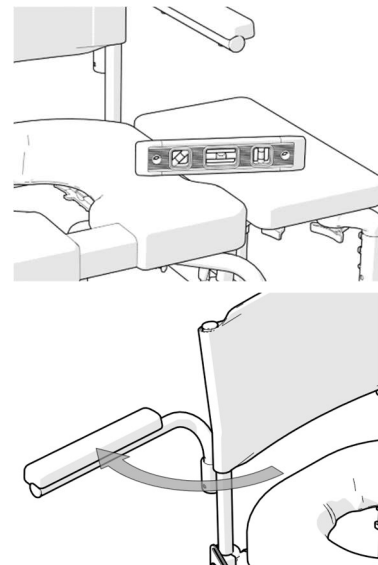

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZE-TUOLIIN ILMAN VALVONTAA.


TÄRKEÄÄ!

KUN TUOLISSA ON VALINNAINEN SELKÄTUKI, ÄLÄ KÄYTÄ KÄSITUKIA RAZEN NOSTAMISEEN KÄYTTÄJÄN KANSSA TAI ILMAN!

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄ SIIRRETÄÄN TUOLIIN. ISTUIMEN TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ KOKONAAN ISTUIMEN TAKATUKIEN ALLE. ISTUIMEN ETUKANNATTIMET ON LUKITTAVA TIUKASTI ISTUIMEN ETUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE. SEKÄ ISTUIMEN ETU- ETTÄ TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ PAIKALLEEN KIRISTÄMÄLLÄ 8 RUUVIA ISTUIMEN ALAPUOLELLA.

KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI HOITAJILLE ON ANNETTAVA OHJEET ISTUIMEN ASIANMUKAISESTA IRROTTAMISESTA JA ASENTAMISESTA PUHDISTUSTA VARTEN.

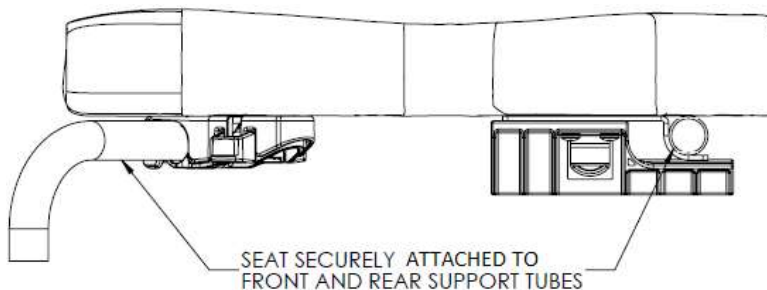

Huom: Istuimen takakannattimet voivat poiketa kuvasta. Yllä olevassa kuvassa näkyvät takakannattimet ovat valinnaista wc-astiaa varten.

KÄYTTÖTARKOITUSILMOITUS

YKSILÖLLISESTI KONFIGUROITAVA, KIINTEÄ WC-TUOLI KÄYTETTÄVÄKSI SUIHKUSSA JA WC:SSÄ.

TÄRKEÄÄ!

RAZE ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖÖN:

- APUNA SUIHKUSSA / KYLVYSSÄ, WC:SSÄ KÄYNNISSÄ JA MUISSA HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN LIITTYVISSÄ TOIMINNOISSA;
- KÄYTTÄJÄN KEHON TUKEMISEEN ISTUVASSA ASENNOSSA;
- HOITAJAN AVUSTAMANA TAI ILMAN;
- VAKIOMALLISEN WC-ISTUIMEN YLÄPUOLELLA TAI ALUSASTIAISTUIMEN ALUSASTIAN KERA;
- AINOASTAAN SISÄKÄYTTÖÖN;

RAZE EI SUORITA HOIDOLLISIA TAI DIAGNOSTISIA TOIMINTOJA, EIKÄ SE OLE TARKOITETTU MIHINKÄÄN HOIDOLLISIIN TAI DIAGNOSTISIIN TARKOITUKSIIN. KAIKKI RAZ-PERHEEN VALMISTAMAT TUOTTEET OVAT EI-STERIILEJÄ, UUDELLEENKÄYTETTÄVIÄ, EI-INVASIIVISIA JA EI-IMPLANTOITAVIA.

RAZE ON TARKOITETTU HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOILLA ON LIIKKUMISRAJOITTEITA, JOILLA VOI OLLA VAIKEUKSIA SEISOA TAI SÄILYTTÄÄ TASAPAINO SUORITTAESSAAN TOIMINTOJA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TYYPILLISILLÄ KÄYTTÄJILLÄ ON RAJALLINEN KESTÄVYYS JA ASENNONHALLINTA, JA HE SAATTAVAT TARVITA APUA HOITAJALTA EDELLÄ MAINITUISSA TOIMINNOISSA.


TÄRKEÄÄ!

KONSULTOI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTA, JOS KÄYTTÄJÄNÄ KOKEET EPÄMUKAVUUTTA, LIIKKUVUUDEN MUUTOKSIA TAI VAIKEUKSIA LAITTEEN KÄYTÖSSÄ.

TUOTTEEN MERKINNÄT JA TAI SYMBOLIT

TUOTTEEN NIMIKKEET	Raze
VALMISTAJAN OSOITE	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
VALTUUTETUN EDUSTAJAN TIEDOT	EC REP UKRP CH REP
TUOTTEEN KUVAUS	SN RAE-XXXXXX
UDI-DI	UDI 628758004448
LÄÄKINNÄLLINEN LAITE	MD
EUROOPPALAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS	CE
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ	
KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO	
LUE KÄYTTÖOPAS	

ISTUIMEN ETUKANNAKKEEN ASENNUS (JOS KÄYTÖSSÄ)

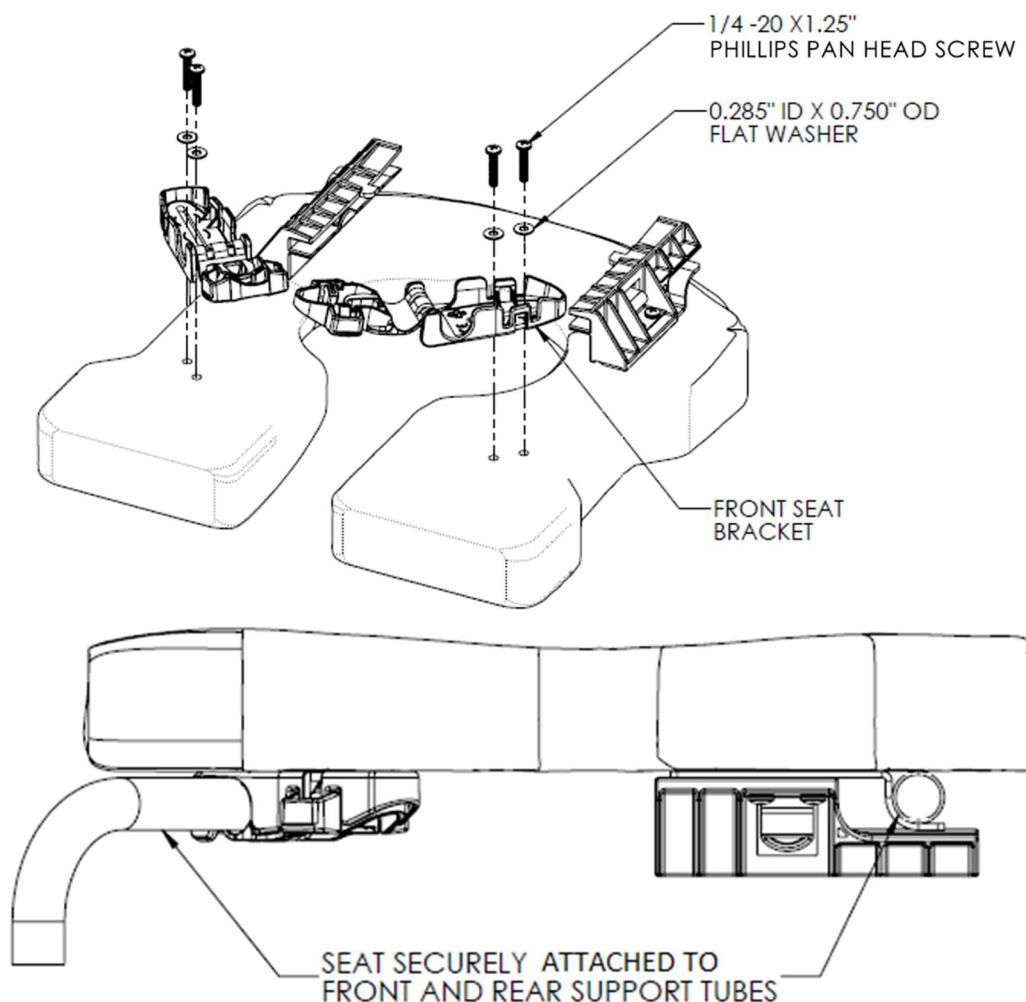

Katso yllä olevasta kuvasta asennusohjeet.

Huom: Istuimen takakannattimet voivat poiketa kuvasta. Yllä olevassa kuvassa näkyvät takakiinnikkeet ovat lisävarusteena saatavaa wc-astiaa varten.

Huom: Asenna Phillips Pan Head -ruuvit käsin. Sähkötyökalujen käyttö voi aiheuttaa kannakkeiden muodonmuutoksen.

Varmista asennuksen jälkeen, että kannakkeet on kunnolla kiinnitetty istuimeen. Avaa ja sulje etukannakkeet tarkistaaksesi niiden toimivuuden.


Varmista aina, että istuin on oikein asennettu ja kiinnitetty. Takakoukkujen on oltava täysin kytkettyjä istuimen takatukiputkiin ja etukannattimien on oltava salvattuja ja lukittuja istuimen etutukiputkien ympärille.

KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYyjÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0 YLEISIÄ TIETOJA	10
1.1 Razen yleiskatsaus	10
1.2 Razen tekniset tiedot	10
1.2.1 Tuolin tekniset tiedot	10
1.2.2 Lisävarusteiden tekniset tiedot	10
2.0 KOKOONPANO	11
2.1 WC-käyttöön valmistelu	11
2.2 Asennus ammeen käyttöä varten	12
2.3 Raz-istuimen	12
2.3.1 Raz-istuimen asennus	12
2.4 Selkänojan asennus	13
2.4.1 Verhoilun asennus	13
2.4.2 Selkänojan asennus	13
2.4.3 Käsinojan asennus	13
2.5 Kahvan asennus	13
2.6 Siirtopinnan asennus (vaaditaan ammeen käyttöä varten)	14
2.6.1 Siirtopinnan kokoonpano	14
2.6.2 Siirtopinnan asennus	14
3.0 SÄÄDÖT	15
3.1 Istuimen säätö – VAIN JÄLLEENMYyjÄN KÄYTTÖÖN	15
3.1.1 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen	15
3.2 Istuimen korkeuden säätö	15
3.3 Istuimen alla olevan vapaan tilan säätö	16
3.3.1 Istuimen alla olevan vapaan tilan säätö	16
3.3.2 Siirtopinnan alla olevan vapaan tilan säätö	16
3.3.3 Razen jalkakokoonpanot	17
4.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA	18
4.1 Razen käyttö korotettuna WC-istuimena	18
4.2 Razen käyttö kylpyamme-/suihkuistuimena	18
4.3 Alusastia	19
5.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	20
5.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen	20
5.1.1 Alusastia	20
5.1.2 Istuin	20
5.2 Puhdistus tarvittaessa	20
5.2.1 Runko, selkänoja, käsinojat ja muut osat	20
5.3 Suositellut puhdistustuotteet	20
6.0 RAJOITETTU TAKUU	21
7.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN	22
8.0 YHTEYSTIEDOT	22

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Razen yleiskatsaus

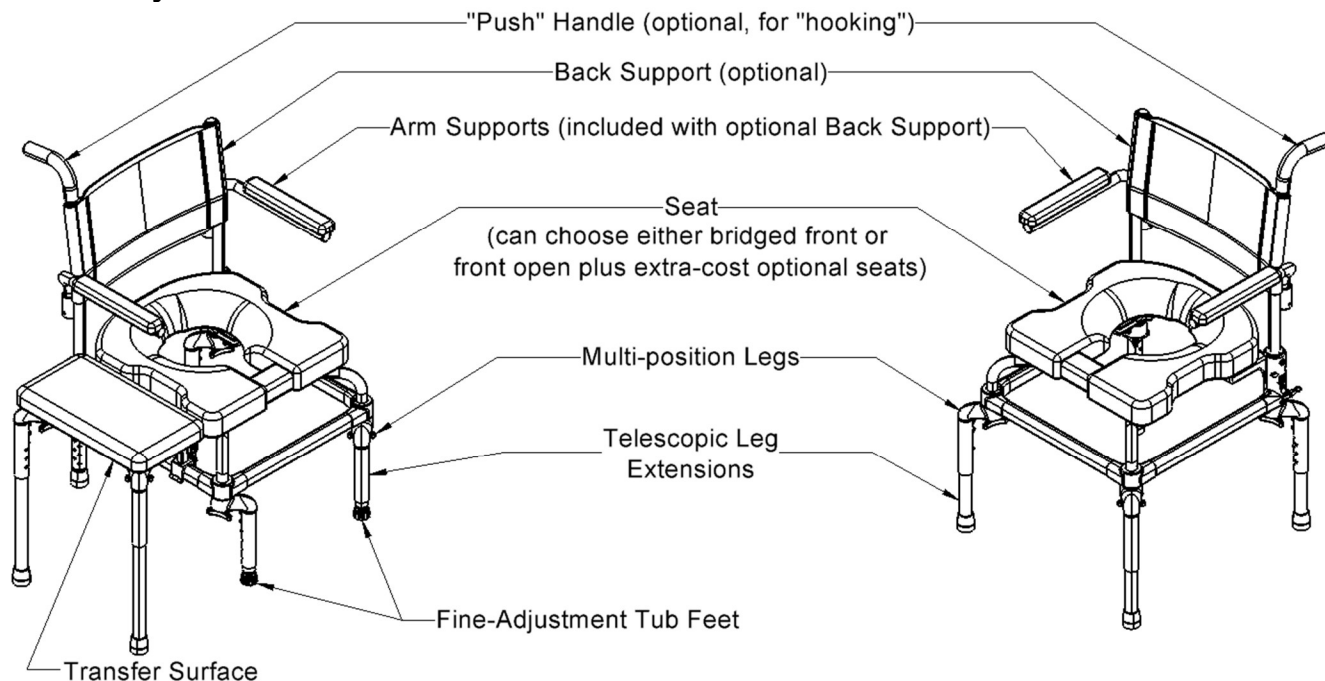

Kuvio 1.1 Raze-ammetuolin (vasen) ja Raze WC-tuolin (oikea) yleiskatsaus.

1.2 Razen tekniset tiedot

1.2.1 Tuolin tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raze WC-tuoli (selkänojaton)	Raze WC-tuoli (selkänojallinen)	Raze-ammetuoli (kapealla siirtopinnalla)
PAINOKAPASITEETTI	160 kg (352 lbs)		
KEHYKSEN JA RUNKO- OSIEN MATERIAALI	Alumiini (Elinikäinen takuu ruostumista vastaan)		
ISTUINRUNGON PAINO	49,5 cm (19,5")		
KOKONAISPITUUS	51–61,5 cm (20"-24,25")		
KOKONAISSLEVEYS	51–60,5 cm (20"-23,75")	59–60,5 cm (23,25"-23,75")	75,5–79,5 cm (29,75"-31,25")
WC-ISTUIMEN KOKO	Leveys 45,5 cm (18 tuumaa) × Syvyys 43 tai 51 cm (17" tai 20")		
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	51,5–59 cm (20,25"-23,25") 54–59 cm (21,25–23,25") siirtoalustalla 1,25 cm (0,5") välein		–
ISTUIMEN ALLA OLEVA VAPAA KORKEUS	42–49,5 cm (16,5"-19,5") 1,25 cm (0,5") välein * ilman kiinnikkeitä +0,75"		–
ISTUIMEN ALLA OLEVA VAPAA LEVEYS	28,5–39,5 cm (11,25"-15,5")		–
TUOTTEEN PAINO	19 paunaa	26 paunaa	33,5 paunaa


1.2.2 Lisävarusteiden tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Selkätuki käsinojilla
SELKÄNOJAN PEHMUSTEEN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	38 cm (15")
SELKÖNOJAN LEVEYS	47 cm (18,5")
KÄSINOJEN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	23 cm (9")

TEKNISET TIEDOT	Siirtopinta - Kapea	Siirtopinta - Leveä
SIIRTOPIINNAN SYVYYS	40,5 cm (16")	
SIIRTOPIINNAN LEVEYS	22 cm (8,5")	32 cm (12,5")
AMMEEN KESKIKOHDASTA AMMEEN ULKOSEINÄÄN	43 m (17") MAKS.	53.5 m (21") MAKS.
SIIRTOPIINNAN KORKEUS LATTIASTA	53,5–61 cm (21–24") lattiaan kylpyammeen ulkopuolella	
AMMEEN SEINÄN VAPAA KORKEUS	42,5–50 cm (16,75–19,75") lattiaan kylpyammeen ulkopuolella	

2.0 KOKOONPANO


TÄRKEÄÄ: Raze-tuolin jalat vaihtelevat Razen käyttötarkoituksen mukaan. Varmista, että oikeat komponentit on valittu oikeaa kokoonpanoa varten. Kaikki Raze-jalkojen versiot on esitetty kuvassa 2.1.

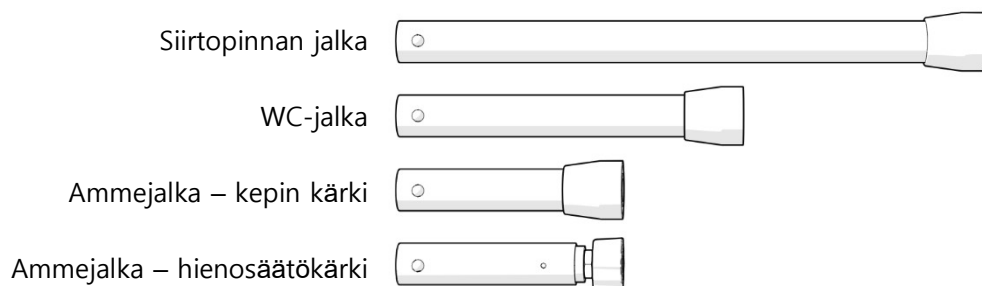


Kuvio 2.1 Raze-jalkojen tyypit.

2.1 WC-käyttöön valmistelu

1. Aseta istuimen etutukiputket runkoon.
2. Aseta runko ylösalaisin.
3. Asenna toinen jalka runkoon 45 asteen kulmassa ulospäin (kuva 2.3).
4. Kiinnitä jalka mukana tulevalla kolmiomutterilla.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 asentaaksesi loput jalat.
6. Varmista, että kaikki kolmiomutterit on kiristetty.
7. Testaa jokainen jalka varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni.
8. Sääda Razen korkeutta tarpeen mukaan jousipainikkeilla.

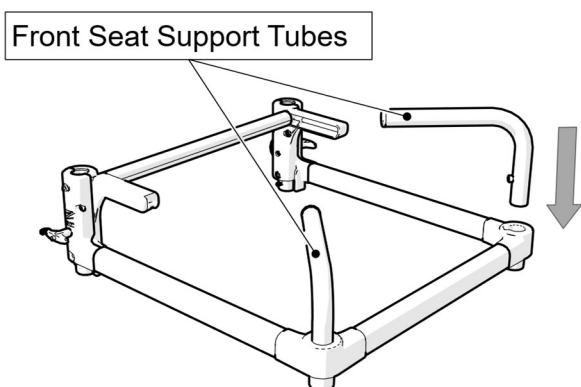

Kuva 2.2 Etuistuimen tukiputken asennus.

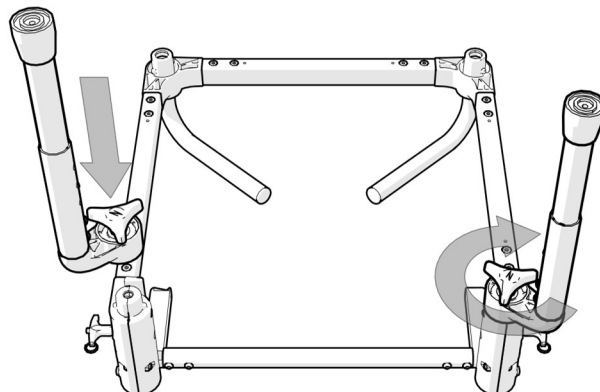

Kuva 2.3 Jalan asennus 45 asteen kulmassa ulospäin wc-istuimen yläpuolella käytettäväksi.

TÄRKEÄÄ!


KÄYTETTÄESSÄ KYLPYAMMESSÄ RAZE:LLE ON OLEVA SIIRTOPINTA KIINNITETTYNÄ.

2.2 Asennus ammeen käyttöä varten


1. Aseta istuimen etutukiputket runkoon.
2. Aseta runko ylösalaisin.
3. Asenna kaksi jalkaa Razen etuosassa olevilla hienosäätökärjillä. Hienosäätöä käytetään ammeen pohjan kaltevuuden mukauttamiseen.

Huom: Useimpien ammeiden jalkojen tulee olla sisäänpäin päin, jotta ne mahtuvat ammeen kapeaan pohjaan.

4. Kiinnitä jalat kiinnitetyllä kolmiomutterilla.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 asentaaksesi loput jalat.
6. Varmista, että kaikki kolmiomutterit on kiristetty.
7. Testaa jokainen jalka varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni.
8. Aseta kehys kylpyammeeseen haluttuun paikkaan.
9. Sääda Razen korkeus ammeessa jousipainikkeella.
10. Käytä hienosäätökärkiä istuimen tasaamiseen.
11. Kiristä kierteitettyjen jalkojen vastamutterit lukitaksesi ne säätöasentoihin.
12. Kiinnitä ja tasoita siirtopinta. (Katso Kuva 2,6).

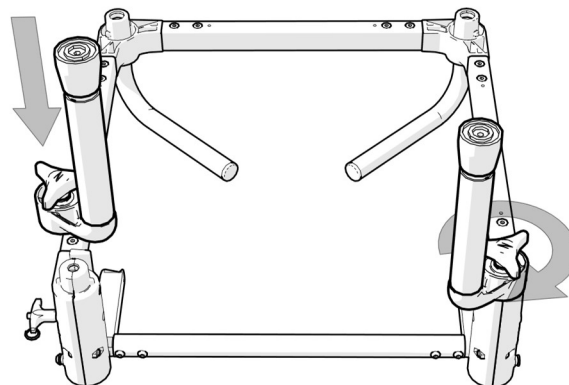

Kuva 2.4 Jalan asennus 45 asteen kulmassa sisäänpäin ammeessa käyttöä varten.

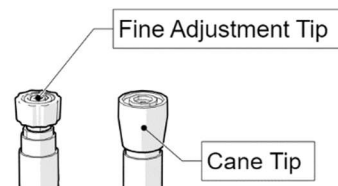


Kuva 2.5 Hienosäätökärjellä varustettu jalka (vasen) ja keppikärjellä varustettu jalka (oikea)

2.3 Raz-istuimen

2.3.1 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avaa etukannattimet puristamalla kielekkeitä kannattimen saranoidussa osassa.
2. Liu'uta istuimen takaosa takaosan tukiputkien yli samalla kun istuimen etuosa lasketaan runkoon. Tarkista, että takaistuimen kiinnikkeet tarttuvat alhaalta ja ovat täysin kiinni takaistuimen tukiputkessa.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.

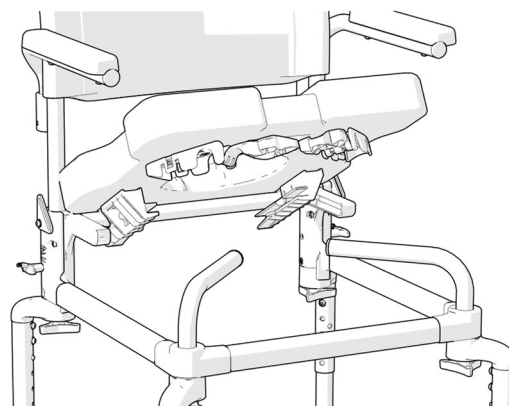


Kuva 2.6 Raz-istuimen asennus

2.4 Selkänojan asennus

2.4.1 Verhoilun asennus

1. Aseta verhoilu tasaiselle alustalle siten, että Raz-logo on näkyvissä ja pystysuorassa.
2. Työnnä selkänojan tukipylväät verhoiluun alhaalta päin, kunnes käsinojen kiinnikkeet ovat verhoilun alapuolella.


Huom: Raz-logon on oltava selkänojan takaosassa oikein päin ylöspäin.

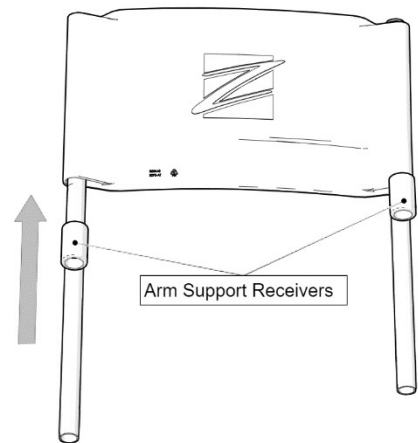

Kuva 2.7 Selkänojan verhoilun asentaminen takaa

2.4.2 Selkänojan asennus


1. Irrota T-kahvan pikalukitusapit istuinrungosta painamalla painiketta ja vetämällä ne ulos.
2. Aseta selkänojatolpat istuinrungon vastakappaleisiin.
3. Takatolpissa on kohdistuslovet, jotka kohdistavat tolpat eteenpäin.
4. Kun kohdistuslovet ovat kokonaan paikoillaan kohdistustapeissa, tolpat voidaan kiinnittää runkoon asettamalla T-kahvan pikalukitusapit takaisin paikoilleen.
5. Varmista, että tapit ovat kokonaan rungon läpi ennen painikkeen vapauttamista.
6. Varmista, että selkänojan tukipylväät ovat tukevasti kiinni asennuksen jälkeen.

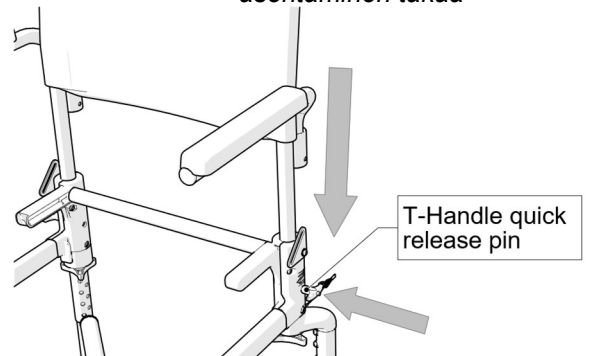

Kuva 2.8 Selkänojan asennus

2.4.3 Käsinojan asennus


1. Aseta käsinojat vastaanottimiin.
2. Kierrä ja työnnä käsinojaa, kunnes se saavuttaa vastaanottimen pohjan. Eteenpäin suuntautuvassa asennossa kohdistuslovet ovat kohdistustappien päällä estäen käsinojen pyörimisen.
3. Varmista asennuksen jälkeen, etteivät käsinojat pyöri, ellei niitä nosteta hieman vastaanottimesta.

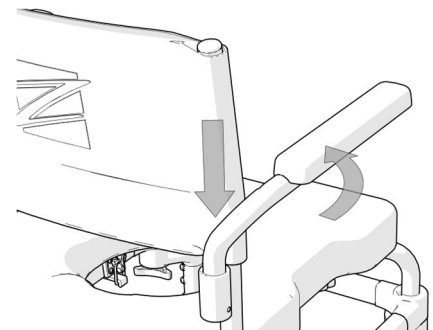

Kuva 2.9 Käsinojan asennus

2.5 Kahvan asennus

1. Irrota pistoke, jos se on asennettu.
2. Paina kahvan tolpassa olevaa painiketta.
3. Aseta kahvatolppa selkänojan runkoon.
4. Kohdista nappi rungon reikään.
5. Varmista, että nappi on kokonaan reikään painettuna ja että se ei liiku asennuksen jälkeen.

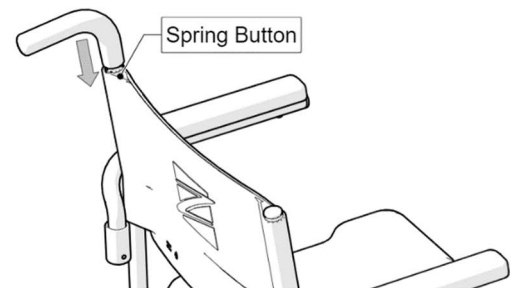

Kuva 2.10 Kahvan asennus

2.6 Siirtopinnan asennus (vaaditaan ammeen käyttöä varten)

2.6.1 Siirtopinnan kokoonpano


1. Aseta siirtopinta ylösalaisin.
2. Asenna yksi teleskooppijalka siirtopinnalle 45 asteen ulospäin suuntautuvaan asentoon (kuva 2.9).
3. Kiinnitä jalka mukana tulevalla kolmiomutterilla.
4. Toista vaiheet 3 ja 4 asentaaksesi toisen jalan.
5. Löysää siirtopinnan alla olevia kolmiopuristimia.
6. Liu'uta kaksi liitosjalkaa puristimiin.
7. Kiinnitä liitosjalat kiristämällä kolmiopuristimia.
8. Varmista, että kaikki kolmiomutterit on kiristetty.

2.6.2 Siirtopinnan asennus


1. Avaa yhden liitosjalan kiinnike vapauttamalla salpa punaisella vivulla.
2. Toista yllä oleva vaihe toiselle liitosjalle.
3. Aseta siirtoalusta tuolin halutulle puolelle siten, että kiinnikkeet ovat istuimen rungon päällä.
4. Kohdista puristimet suunnilleen istuimen rungon keskelle.
5. Sääda siirtoalustan teleskooppijalkoja siten, että se on istuimen kanssa samassa tasossa. (Katso kohta 3.2).
6. Sulje kiinnikkeet salpakiristimellä siirtopinnan kiinnittämiseksi.

Huom: Jos salvat eivät sulkeudu, löysää siirtopinnan alla olevia kolmiopuristimia kohdistaaksesi liitosjalat rungon kanssa.


7. Varmista, että siirtopinta ei liiku asennuksen jälkeen.

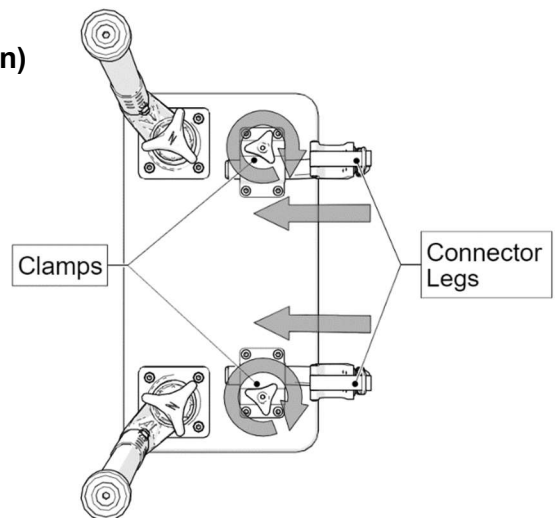

Kuva 2.11 Teleskooppijalkojen (vasen) ja liitosjalkojen (oikea) asentaminen siirtotasolle 45° ulospäin kulmassa

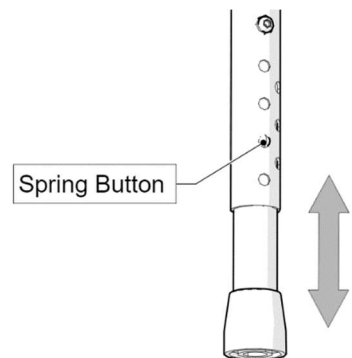

Kuva 2.12 Teleskooppijalat

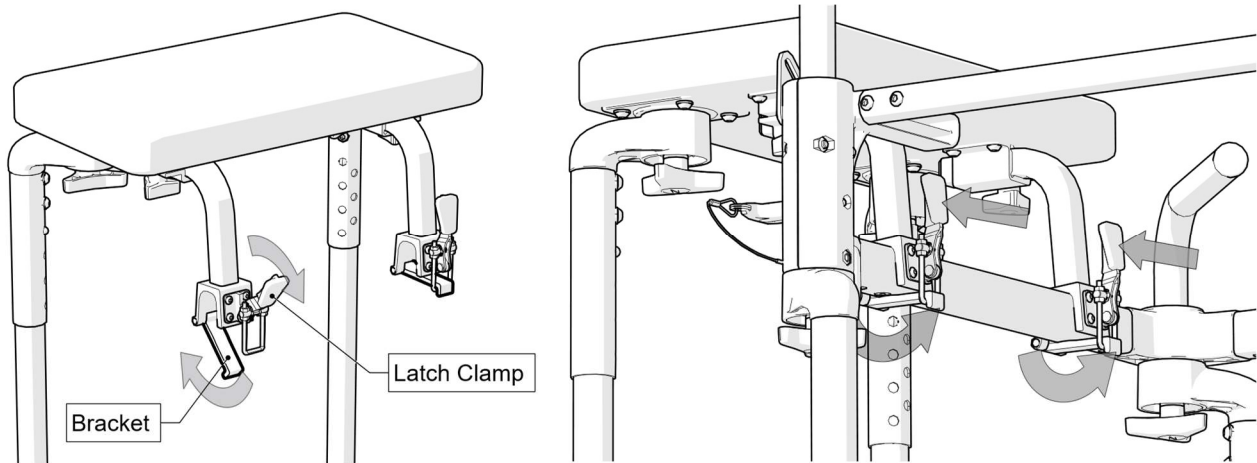

Kuva 2.13 Siirtopinnan asennus; salpakiristimen vapauttaminen (vasen), siirtopinnan kiinnittäminen tuolin runkoon (oikea)

3.0 SÄÄDÖT

TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.


3.1 Istuimen säätö – VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN

3.1.1 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säätäminen

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu-/takasuuntainen säätövara, joka mahdollistaa istuimen aukon optimaalisen sijoittamisen käyttäjän istuinluiden ympärille.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
 2. Nosta istuimen etuosaa, vedä ylöspäin ja sitten eteenpäin irrottaaksesi istuimen tuolista.
 3. Löysää (mutta älä irrota) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen.
- Huom: Istuimen takakannattimet on esitetty alla ilman alusastian kannattimia selkeyden vuoksi.*
4. Aseta istuin takaisin paikoilleen runkoon ja sulje istuimen etukannattimet etutukiputkien ympärille.
 5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
 6. Tarkista, että istuimen takakannattimet ovat tiukasti sijoitettu takatukiputkea vasten.
 7. Kiristä kaikki kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimeen estääksesi istuimen liikkumisen. *Huom: Varmista, että istuimen etu- ja takakannattimet on tiukasti lukittu istuimen etu- ja takatukiputkien ympärille ennen käyttäjän siirtymistä tuoliin.*

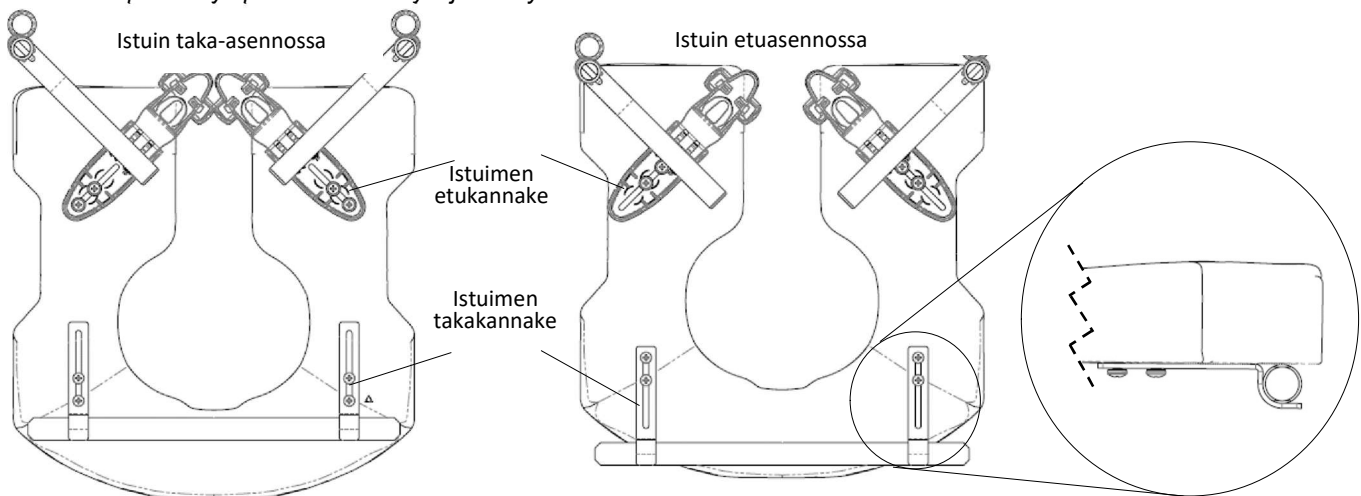

Kuva 3.1 Kuva Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) -järjestelmästä, jota käytetään istuimen syvyyden säätöön.


TÄRKEÄÄ!

SEKÄ ISTUIN ETTÄ SIIRTOALUSTA ON ASETETTAVA VAAKATASOON ENNEN KÄYTTÖÄ. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ KALLISTAA ISTUINKULMAA MUUTTAMALLA JALKOJEN KORKEUTTA, SILLÄ SE VÄHENTÄÄ TUOLIN VAKAUTTA JA VOI JOHTAA KAATUMISEEN.

3.2 Istuimen korkeuden säätö

Raze-tuolissa on neljä teleskooppijalkaa, jotka mahdollistavat 10 cm (3") korkeussäädön. Korkeuden säätäminen:

1. Paina jousipainiketta vapauttaaksesi teleskooppijalan.
2. Liu'uta jalkaa kohdistaaksesi jousipainikkeen haluttuun säätöreikään.
3. Varmista, että jousipainike on kokonaan lukittunut säätöreikään.
4. Toista vaiheet 1–4 kaikille muille tuolin jaloille. Ne on säädettävä siten, että tuolin istuin on vaakasuorassa.

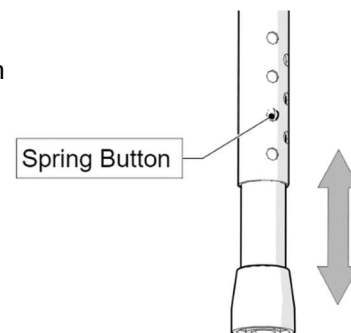

Kuva 3.2 Teleskooppijalat


TÄRKEÄÄ!

AMMEET OVAT TYYPILLISESTI KAPEITA. RAZEN SOVITTAMISEKSI KYLPYAMMEESEEN JALKA ON EHKÄ KÄÄNNETTÄVÄ SISÄÄNPÄIN JALANJÄLJEN KAVENTAMISEKSI. JALANJÄLJEN KAVENTAMINEN VÄHENTÄÄ VAKAUTTA. TÄSTÄ SYYSTÄ RAZE-TUOLIA EI SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ KYLPYAMMESSÄ ILMAN KIINNITETTYÄ SIIRTOPINTAA.

Ammekäyttöä varten Razessa on kaksi jalkaa, joissa on säädettävät ammeen jalat, jotka mahdollistavat hienomman korkeuden säädön. Nämä on asennettava tuolin etupuolelle.

1. Kierrä kumikärkeä pienentääksesi tai suurentaaksesi korkeutta.
2. Toista vaihe 1 kaikille muille tuolin jaloille. Ne on säädettävä siten, että tuolin istuin on vaakasuorassa.
3. Kun istuin on vaakasuorassa, kiristä kierteitettyjen jalkojen vastamutterit lukitaksesi ne säätöasentoihinsa.
4. Varmista, että tuolin kaikki kumikärjet ovat täysin kosketuksissa kylpyammeen tai kylpyhuoneen lattian tasaiseen pintaan.

Siirtopinnassa on kaksi teleskooppijalkaa, joita voidaan säätää samalla tavalla kuin yllä olevissa ohjeissa. Sekä tuoli että siirtoalusta on asetettava vaakatasoon ennen käyttöä.

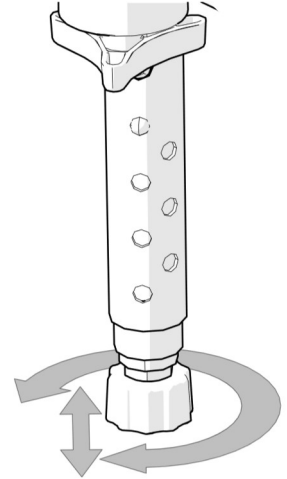

Kuva 3.3 Hienosäätökärjellinen jalka

TÄRKEÄÄ!

KORKEAMMAT ISTUIMEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN.

3.3 Istuimen alla olevan vapaan tilan säätö

3.3.1 Istuimen alla olevan vapaan tilan säätö


RAZE-tuolissa on neljä moniasentoon kääntyvää jalkaa, joiden leveyden säätöalue on 8". Katso esimerkki jalkojen asennoista kohdasta 3.3.3.

1. Löysää jalan paikallaan pitävää kolmiomutteriä, kunnes jalkaa voi kiertää.
2. Käännä jalka haluttuun asentoon.
3. Kiinnitä kolmiomutteri pitämään jalka paikallaan.
4. Varmista, että kolmiomutteri pitää jalat tiukasti paikoillaan niin, etteivät jalat liiku säädön jälkeen.
5. Toista vaiheet 1–4 kaikille muille kolmelle jalalle.

3.3.2 Siirtopinnan alla olevan vapaan tilan säätö

RAZE-siirtopinnassa on kaksi lattiaan ulottuvaa, moneen asentoon kääntyvää jalkaa ja kaksi tuolin runkoa tukevaa liitosjalkaa. Moniasentoisten kääntyvien jalkojen säätäminen:



1. Löysää jalan paikallaan pitävää kolmiomutteriä, kunnes jalkaa voi kiertää.
2. Käännä jalka haluttuun asentoon.
3. Kiinnitä kolmiomutteri pitämään jalka paikallaan.
4. Varmista, että kolmiomutteri pitää jalat tiukasti paikoillaan niin, etteivät jalat liiku säädön jälkeen.
5. Toista vaiheet 1–4 toiselle jalalle.


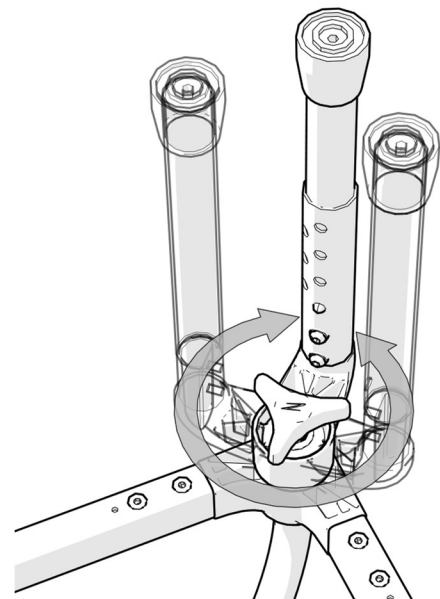


Kuva 3.4 moniasentoinen kääntyvä jalka, p 45° välein

3.3.3 Razen jalkakokoonpanot

Moniasentoiset jalat voidaan sijoittaa kauemmas toisistaan paremman vakauden saavuttamiseksi tai lähemmäs toisiaan, jotta ne sopivat kapeampien kylpyammeen seinien väliin. Tapauksissa, joissa jalka aiheuttaa vaaran siirtymissä, se voidaan sijoittaa niin, että alue on vapaa esteettömän pääsyn takaamiseksi tuoliin. Katso esimerkkejä tapauskohtaisista kokoonpanoista alla olevista taulukoista.

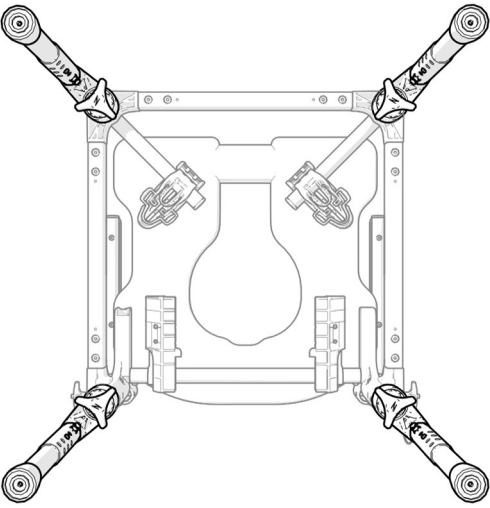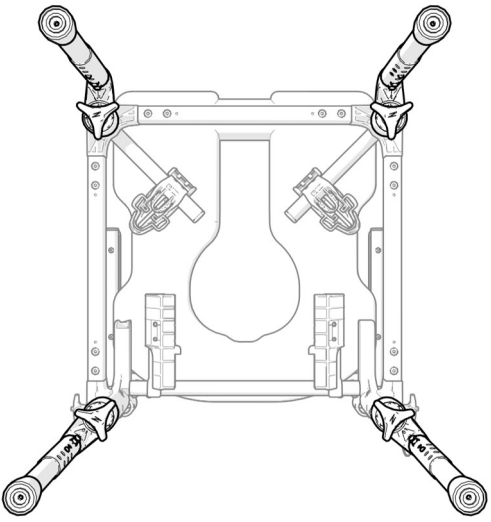Optimaalinen vakaus WC-käyttöön	Pitkä istuin, WC-käyttöön
	
Huom: Etujalat voivat haitata siirtymisiä ja ne on ehkä asetettava uudelleen.	

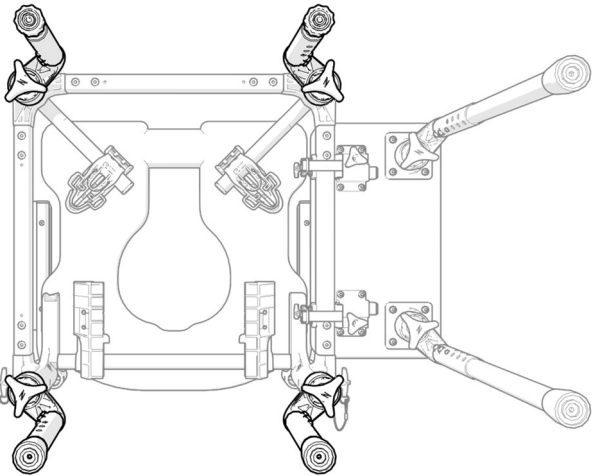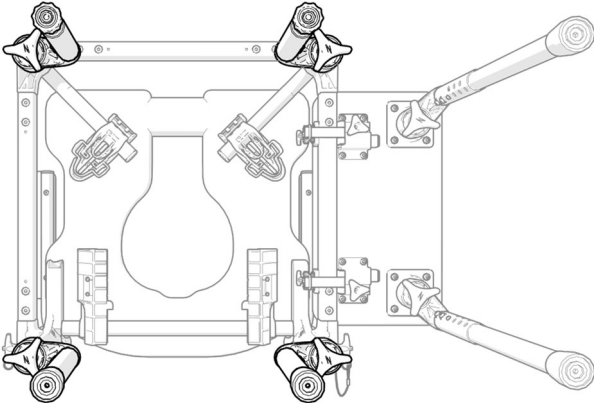Optimaalinen vakaus ammekäyttöön	Kapein kokoonpano, kapeaan ammeeseen
	

4.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

4.1 Razen käyttö korotettuna WC-istuimena

1. Varmista, että Raze-tuolissa on wc-istuinjalat asennettuna. On erittäin suositeltavaa välttää ammejalkojen käyttöä wc-istuimen yläpuolella, koska istuimen alle ei välttämättä jää riittävästi tilaa. Katso eri amme- ja wc-istuinjalkamallien vapaat korkeusvaihtoehdot teknisistä tiedoista (kohta 1.1).
2. Avaa wc-istuimen kansi.
3. Sääda istuimen korkeutta niin, että istuimen alle jää riittävästi tilaa wc-istuimelle.
4. **On erittäin suositeltavaa sijoittaa jalat 45° kulmaan ulospäin optimaalisen vakauden saavuttamiseksi. ÄLÄ aseta jalkoja sisäänpäin.**
5. Aseta Raze-tuoli wc-istuimen päälle liu'uttamalla tai nostamalla Raze-tuolia istuinrungosta.
6. Kohdista istuin wc-istuimen kanssa.
7. Varmista, että tuolin kaikki jalat ovat kosketuksissa lattiaan ja että Raze ei keinu.
8. Testaa ennen käyttöä, että siirrot voidaan tehdä turvallisesti.



Kuva 4.1 Raze wc-istuimen päällä; jalat 45° ulospäin maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.

4.2 Razen käyttö kylpyamme-/suihkuistuimena


TÄRKEÄÄ!

KÄYTETTÄESSÄ KYLPYAMMESSÄ RAZE:LLE ON OLEVA SIIRTOPINTA KIINNITETTYNÄ.

TÄRKEÄÄ!

RAZE-TUOLIA EI SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ AMMEESSA ILMAN AMMEJALKOJA. SÄÄDETTÄVÄT AMMEJALAT OVAT TÄRKEÄT VAKAUDEN SAAVUTTAMISEKSI KALTEVALLA

1. Sääda jalkojen asentoa tarvittaessa varmistaaksesi, että tuoli mahtuu ammeeseen. **Jalat on asetettava mahdollisimman leveälle ja kokonaan ammeen pohjaa vasten, ei kaareville sivuille.**
2. Sääda istuimen korkeutta tarvittaessa teleskooppijaloilla. Istuimen on oltava riittävän matala, jotta istujan jalat koskettavat lattiaa istuessa.
3. **Asenna siirtopinta. ÄLÄ käytä kylpyammeessa ilman siirtopintaa.**
4. Nosta Raze-tuoli istuinrungosta ja aseta se kylpyammeeseen tai suihkuun.
5. Käännä säädettäviä ammejalkoja asettaaksesi istuimen vaakatasoon maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
6. Varmista, että tuolin kaikki neljä jalkaa ovat kosketuksissa kylpyammeen pohjaan tai suihkun lattiaan.
7. Testaa ennen käyttöä, että siirrot voidaan tehdä turvallisesti.

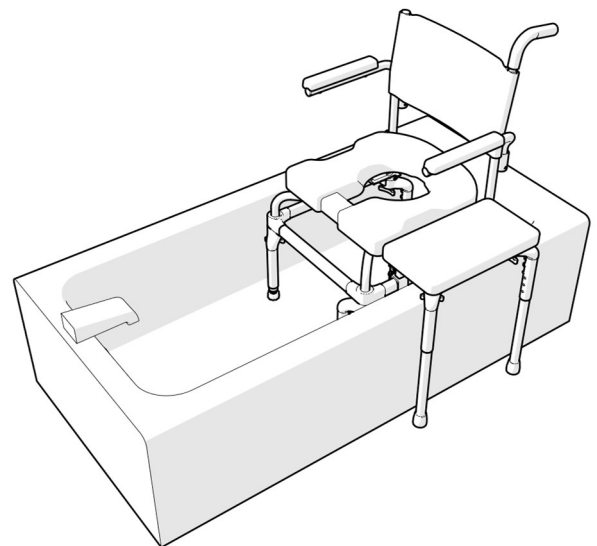


Kuva 4.2 Raze ammeessa siirtopinnan kera; jalat 45° sisäänpäin.

4.3 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin.

HUOM: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.

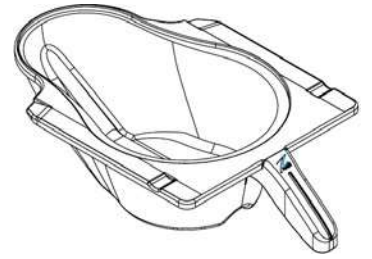

Kuva 4.3 Alusastia

5.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

5.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

5.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

5.1.2 Istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.
ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.
3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympärykseen pääsee käsiksi paremmin.

5.2 Puhdistus tarvittaessa

5.2.1 Runko, selkänoja, käsinojat ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.
2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä. **ÄLÄ** sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.
3. **ÄLÄ** käytä klooria sisältäviä tuotteita millekään Raze-osille.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden säännöllistä tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toiminnassa havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko suihkutuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

5.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Desinfioiva pintapuhdistusaine Keskitalon desinfiointiaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAUSJAUHEITA TAI HANKAUSTYYNYJÄ RAZE-ALUSASTIA-SUIHKUTUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA SIIRRETTÄVÄÄ RAZE-ALUSASTIA-SUIHKUTUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINESUOJAT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEEN OHJEISIIN JA RYHTYMÄTÄT TARVITTAVIIN VAROTOIMIIN LIITTYEN IHMISTEN ALTISTUMISELLE KEMIKAALILELLE.

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle siirrettävälle Raze-alusastia-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla siirrettävän Raze-alusastia-suihkutuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit siirrettävän Raze-alusastia-suihkutuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisia:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin, tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä siirrettävän Raze-alusastia-suihkutuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Näihin sisältyvät rajoittumatta valtuuttamattomien osien tai lisälaitteiden käyttö, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoa pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan siirrettävään Raze-alusastia-suihkutuoliin.

Raz Design Inc. runko- ja rakennemateriaalit ovat ruostumatonta terästä, jolle annamme elinikäisen ruostumatomuustakuun. Huomaa, että tämä elinikäinen takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raze-alusastia-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä. Asianmukaisten puhdistusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa rungon ruostumista ja mitätöidä tämän takuun. Lisäksi kaikki ruostumista koskevat vaatimukset katselmoidaan ja niihin voi liittyä pyyntö palauttaa tuote tarkempaan tutkimukseen ennen kuin vaihtotuotteen tilaus voidaan käsitellä.

7.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN

TÄRKEÄÄ!

Jos tähän laitteeseen liittyen tapahtuu vakava tapahtuma, joka on johtanut tai voi johtaa kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai vakavaan terveydentilan heikkenemiseen, siitä on ilmoitettava viipymättä:

- valmistajalle (yhteystiedot on annettu tässä käyttöohjeessa) ja
- käyttäjän tai potilaan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle.

8.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että siirrettävä Raze-alusastia-suihkutuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta **Error! Hyperlink reference not valid.** Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



JÄLLEENMYYJÄSI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN RAZE-SUIHKUTUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTA A TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEESSEN JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA A ENNEN TUOLIN KÄYTÖN JATKAMSTA. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SUIHKUTUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTITSE	info@razdesigninc.com
PUHELIMITSE:	877.720.5678 (Pohjois-Amerikka)
	1.416.751.5678 (Muu maailma)